

1. Sissejuhatus

See kasutusjuhend sisaldab kirjeldust ja olulist teavet meditsiiniseadme kasutamise kohta. Selle eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne seadme kasutamist on väga oluline juhend hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja täiendada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid ja tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.

Seadme sihipärane kasutamine

Kasutatakse ratastoolis või tõukerattas olevate inimeste abistamiseks, võimaldades kõrgendatud punktidest üle sõita.

Näidustused

Kaldteed on ette nähtud liikumispuudega inimestele, kes kõndimise, seismise või istumise probleemide tõttu on sunnitud kasutama liikumisvahendeid, nagu ratastoolid, tõukerattad, rollaatorid jne. Kaldteed on ette nähtud arhitektuursete takistuste kõrvaldamiseks, ühendades sujuvalt tasandite erinevused. ratastoolikasutaja peab ületama ja seega võimaldavad need ratastoolikasutajal jõuda kohtadesse, kuhu ta tavaliselt ei pääse. Kaldtee on mõeldud kasutamiseks iseseisvalt kasutaja poolt või saatja abiga. Kaldtee kasutamine muudel kui ülalnimetatud eesmärkidel on keelatud.

Vastunäidustused

Vastunäidustusi ei saa seostada konkreetse kliinilise pildiga. Sobiva kaldtee tüübi ja pikkuse valik sõltub paljudest teguritest ning see tuleb alati teha erialaarsti või füsioterapeudi abiga. Järgige 2. peatükis toodud ohutusteavet.

Kasutusvaldkonnad

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

Meditsiinilised juhtumid ja soovimatud sündmused

Seadmega seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüjaga

2. Ohutusnõuded

- Veenduge, et kõik seadet kasutavad isikud on selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kahjustuste ja/või vigastuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest.
- Kasutage toodet ainult laitmatus seisukorras.
- Kui avastate defekte või vigu, peate viivitamatult lõpetama seadme kasutamise ja võtma ühendust edasimüüjaga.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Olge teadlik toote etiketil olevast teabest.
- Kasutage toodet ainult kirjeldatud otstarbel.
- Lubatud on ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud konstruktsioonimuudatused, välja arvatud juhul, kui teil on muude muudatuste jaoks tootja kirjalik luba.
- Seadet ei tohi koormata suurema raskusega, kui on märgitud tehnilistes andmetes.
- Laiuse reguleerimise ajal peab kasutaja jälgima, et ta ei löikaks sõrmi ega muid kehaosi.
- Seadet tohib kasutada ainult stabiilsel pinnal.

Tarnitud osad

Seade tarnitakse pappkarbis. Pakendi sisu on:

- ✓ 1 või enam kummist kaldteed;
- ✓ 1 Kasutusjuhend;

Eelkontroll

Kontrollige ülaltoodud loendist kasti sisu. Kui avastate selles etapis, et osa on puudu või kahjustatud, võtke kohe ühendust tarnijaga.

3. Kirjeldus


Toote kirjeldus

Kummist rambid on valmistatud TPE-st ja ei sisalda toksilisi aineid (PVC vaba). Neid kasutatakse väikese suurusega ukseastmete ja takistuste jaoks. Tootel on soonega pind, mis muudab selle libisemiskindlaks. Kaldteid saab kasutada nii sise- kui välistingimustes.

Montaaži kirjeldus

Laiuse reguleerimine

Laiuse reguleerimine on võimalik, lõigates kaldtee soovitud laiusele kastilõikuri või saelehe tööriista (lisatarvik) abil. Kõrge kaldtee lõikamine võib nõuda korduvat lõikamist, mida muudab kaldtee tahapoole painutamine ja lõigatud soone laiendamine lihtsamaks.

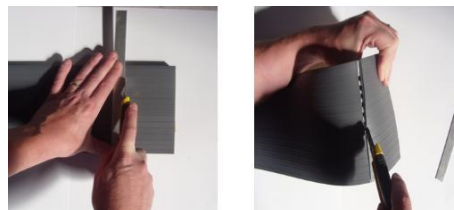

Madala kaldtee lõikamine Kõrge kaldtee lõikamine


Paigaldamine kahepoolse kleelindiga (tarvik)

Seda soovitatakse elamute kohandamisel vastupidavatel põrandakatetel, nagu betoon, plaadid, marmorpõrandad ja lakitud puitpõrandad. Lindi temperatuurikindlus on testitud vahemikus -30 kuni 120 kraadi.


Puhastage kaldtee alumine pind ja kinnitage sellele teip (joonis 1). Enamikul juhtudel ei ole vaja kasutada kummist kaldtee kinnitamiseks kogu teipi. Eemaldage mõned fooliumiribad 3–4 punkti rambi kohta (joonis 2, 3, 4). See hõlbustab vajadusel rampide eemaldamist ja suurendab taaskasutusväärtust. Puhastage pind, millele kaldtee kinnitatakse, ja asetage kaldtee alla nii, et takistuse ja kaldtee vahele ei jääks tühikuid.



Pilt 1 Teibi pealekandmine

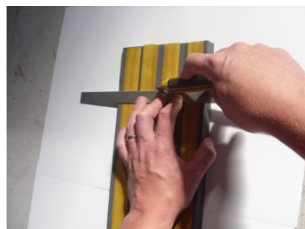

Pilt 2 Fooliumi lõikamine

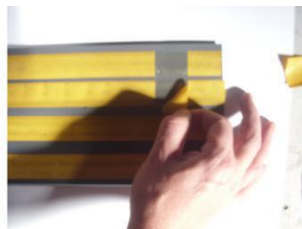

Pilt 3 Fooliumi eemaldamine



Pilt 4 Paigaldamiseks valmis

Paigaldamine kinnitusklambritega

Seda soovitatakse õrnade põrandakatete, nagu vaibad, töötlemata või õrnad puitpõrandad ja ajutised kodukohandused. Kaldteed kõrgusega 28mm või üle selle saab paigaldada koos kinnitusklambritega (joonis 1).


Kaldtee paigaldamiseks koos kinnitusklambritega asetage kummist kaldtee esmalt astme või takistuse servale. Paigaldage kinnitusklambrid ja märkige kohad, kuhu need kinnitatakse (joonis 2). Kaldtee saab kronsteini paigaldamiseks eemale viia. Veenduge, et klambrid oleksid paigaldatud nii, et tihvtide pilud on ülespoole (joonis 2). Kui kinnitusklambrid on takistuse külge kruvitud, pange kandilised tihvtid kaldtee külgedele. Lükake kruvid ülalt kinnitusklambritesse ja lükake kaldtee takistuse poole, kuni kaldtee seda puudutab. Keerake kinnitusklambrite kruvid kinni.



Pilt 1 kinnitusklambrid (306910)



Pilt 2 Kinnitusklambrite kasutamine.

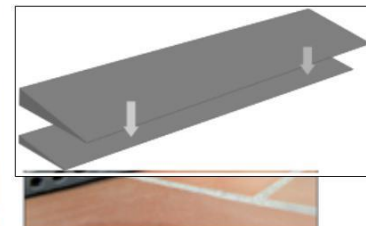

Pilt 3 Kaldteede kombineerimine

Kaldteede komplekti kasutamine

Kaldtee suurema kõrguse saavutamiseks on võimalik kaldteed üksteise peale laduda (joonis 3), samuti kombineerida trepiastmetel paar väiksemat kaldteed, et teha suurem kaldtee (joonis 4).


Funktsiooni kirjeldus

Seadme kasutusotstarve on kirjeldatud peatükis Sissejuhatus.

Aksessuaarid

Seadet saab varustada järgmiste tarvikutega (ei kuulu standardvarustusse):

- ✓ Kinnituskomplekt kummist kaldtee tsingitud, kõrgus 28-60 mm
- ✓ Pusle kummist rambi jaoks
- ✓ Kahekordne kleelint, 20 mm x 50 m
- ✓ Kahekordne kleelint, 35 mm x 50 m
- ✓ Rasvaemaldusvahend liimi eemaldamiseks 1/2 L

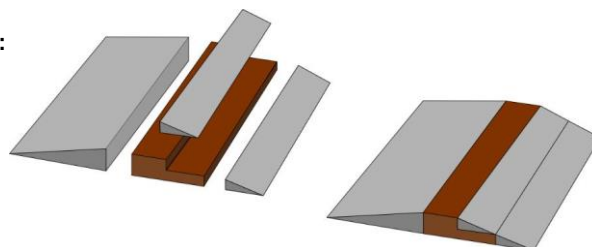


Pilt 4 Kaldteede kohandamine erineva kõrgusega ukسلävedele

4. Tehnilised andmed

Kõrgus	Sügavus	Laius	Kaal
4 mm	40 mm	900 mm	130 g
4 mm	40 mm	1000 mm	150 g
6 mm	60 mm	900 mm	310 g
6 mm	60 mm	1000 mm	350 g
8 mm	80 mm	900 mm	490 g
8 mm	80 mm	1000 mm	540 g
10 mm	100 mm	900 mm	770 g
10 mm	100 mm	1000 mm	860 g
12 mm	120 mm	900 mm	1070 g
12 mm	120 mm	1000 mm	1190 g
16 mm	150 mm	900 mm	1
16 mm	150 mm	1000 mm	1
20 mm	150 mm	900 mm	1
20 mm	150 mm	1000 mm	2
24 mm	150 mm	900 mm	1
24 mm	150 mm	1000 mm	2
28 mm	200 mm	900 mm	2
32 mm	200 mm	900 mm	2
36 mm	200 mm	900 mm	3
40 mm	250 mm	900 mm	3
44 mm	250 mm	900 mm	4
48 mm	250 mm	900 mm	5
52 mm	300 mm	900 mm	5
56 mm	300 mm	900 mm	6
60 mm	300 mm	900 mm	7
60 mm	300 mm	900 mm	4
60 mm	300 mm	1000 mm	5

Kõrgus	Sügavus	Lai	
64 mm	350 mm	700	
64 mm	350 mm	900	
64 mm	350 mm	1000	
68 mm	350 mm	700	
68 mm	350 mm	900	
68 mm	350 mm	1000	
72 mm	350 mm	700	
72 mm	350 mm	900	
72 mm	350 mm	1000	

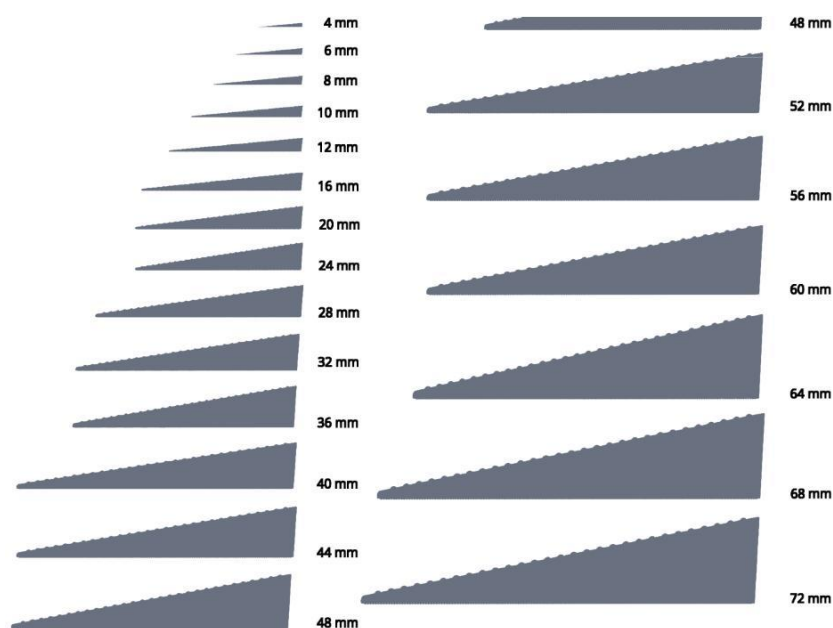

Kummist rambid on saadaval ka pikkusega 700 mm suurustes 10-48 mm (kõik mudelid isekleepuva teibiga).

Toote etikett



Näide toote etiketist

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Batch no/ serial no
	CE-marked product		Item Number
	To be used indoor and outdoor		Medical Device
	Max Elevation / height		

Ikonide tähendus

5. Hooldus ja hooldus

Tavalist mustust saab eemaldada tavaliste puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset tooteteavet ja kasutage ainult puhastusvahendeid, mis sobivad puhastamiseks. Desinfitseerimiseks kasutage ainult desinfitseerimisvahendeid, mis on sertifitseeritud kasutamiseks kohapeal saadaolevate meditsiiniseadmetega.

Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele kulub toode. Seetõttu on soovitatav toodet regulaarsete ajavahemike järel professionaalse teeninduse poolt kontrollida. Soovitame järgmist.

- ✓ Toote puhastamine ja desinfitseerimine
- ✓ Kontrollige toodet kahjustuste või kulumise suhtes ja vajadusel vahetage see välja

Soovitatav kasutusiga: Tavaliselt 10 aastat, olenevalt kasutusest. Hoiustamine:

Soovitame hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C.

Transport

Seade ei ole mõeldud transportimiseks, kuna see on kinnitatud soovitud pinnale.

Taaskasutamine

Toode sobib taaskasutamiseks. Enne uue kasutaja toote ülevõtmist tuleb seade tehniliselt üle kontrollida ja desinfitseerida vastavalt punktile 5. Liimiga kaldteede taaskasutamisel tuleb vana liim eemaldada ja uus teip peale kanda.

Kinnituspunkti puhastamine: Kleplindiga paigaldatud kummirampide eemaldamisel võib pinnale jääda liimijääke. Neid on lihtne eemaldada tavaliste tööriistadega (nt spaatliga) ja ülejäänud liimijäägid saab eemaldada rasvaärastusseadme (art. nr 306905) või sarnase tootega.

6. Levinumad probleemid ja lahendused

<i>Probleemid</i>	<i>Võimalikud põhjused</i>	<i>Lahendused</i>
Kummist ramp on ebastabiilne või ei püsi soovitud asendis	Pind ei ole tasandatud	Kasutage paigalduskomplekti, et kinnitada kaldtee lävepaku külge või otsida alternatiivseid paigaldusviise*

* Õrnatele pindadele nagu vaibad ja puitpõrandad ei ole soovitatav kinnitada kummist rampe kleplindiga.

7. Toote utiliseerimine

Toodet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega ja see tuleb viia kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S pakub 2-aastast garantiid kahjudele, mis on põhjustatud tootmisvigadest või materjalivigadest. Garantii ei kehti toote mittesihipärase remondi või kasutamise korral. Tavapäraselt kuluvatele osadele garantii ei kehti, välja arvatud juhul, kui kulumine on põhjustatud tootmisveast. Kui tootes tehakse muudatusi ilma meie kirjaliku nõusolekuta, ei kehti CE-märgis ja tootegarantii. Selle garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest otse edasimüüjat või Mobilex A/S-i. Garantii ei kata transpordikuluseid ega sisalda hüvitist isikuvigastuste või toote mittekasutamise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimisest.

9. Vastavusdeklaratsioon

Seade on läbinud vastavushindamise vastavalt EL määrusele: MDR 2017/745 seoses meditsiiniseadmetega ja on CE märgistusega. Seadmele on väljastatud vastavusdeklaratsioon ja see on saadaval aadressil:

mobilex.dk/medias/2021-09/CE_rubber-ramps_30610L-306602_8601_0x0px.pdf või

paremal oleva QR-koodi kaudu.

