

VIVAMEL ALGINAT meditsiinilise kastanimeega haavapadi

Enne Vivamel Alginat kastanimeega haavapadja esmakordset kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Hoidke juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

MIS ON VIVAMEL ALGINAT MEDITSIINILISE KASTANIMEEGA HAAVAPADI?

Vivamel Alginat kastanimeega on kaltsiumalgiinaadi baasil valmistatud steriilne haavapadi, mis on täielikult immutatud meditsiinilise kastanimeega. Haavapadi sobib väga erinevate haavade raviks erinevates paranemisfaasides. See sobib eriti hästi krooniliste haavade raviks, mis paranevad halvasti või aeglaselt. Side on hästi imav ja seetõttu ideaalne valik keskmise kuni suure sekretsiooni kogusega haavade raviks. Saadaval kahes suuruses: 10x10 cm ja 5x5 cm. Suurem padi (10x10 cm) sisaldab 20 g, väiksem (5x5 cm) sisaldab 5 g ravimett.

Meditsiiniline mesi

Kastanimesi on kõrge suhkrusisaldusega (kuni 80%), madala veesisaldusega (kuni 17%) ja happelise pH-ga. Tänu oma füüsikalistele omadustele on tal kõrge osmootne aktiivsus, mis loob ebasoodsa keskkonna mikroorganismide kasvuks, stimuleerib haava puhastumist ja soodustab haavade paranemist. Mesi võimaldab niiskes keskkonnas paranemist ja moodustab haavale mehaanilise kaitse.

Kaltsiumalgiinaat

Algiinaat haavapadi on valmistatud kaltsiumalgiinaatkiust, mis on pruunvetikatest saadud looduslik polümeer. Kaltsiumalgiinaadil on kõrge imavusvõime. Kokkupuutel eritistega moodustab padi geeli, mis säilitab haava paranemiseks optimaalse niiske keskkonna. Padjas sisalduvad kaltsiumiioonid vahetuvad haava naatriumiioonidega, pakkudes täiendavat hemostaatilist efekti.

MILLISTE HAAVADE PUHUL SOBIB KASUTADA VIVAMEL ALGINAT HAAVAPATJA?

- kirurgilised haavad
- traumaatilised haavad
- põletused
- jalahaavandid
- diabeetilised jalahaavandid
- lamatised
- kriitiliselt koloniseeritud haavad
- infitseerunud haavad
- halvalõhnlised haavad
- märg nekroos

VIVAMELI KASUTAMISE EELISED

- võimaldab haava paranemist niiskes keskkonnas
- vähendab haava nakatumise riski
- vähendab ebameeldivaid lõhnu
- stimuleerib nekrootiliste kudede puhastamist
- stimuleerib granuleerimist ja epiteelimist
- soodustab haavade paranemist ja ennetab armistumist
- ei kleepu haavale
- ei põhjusta valu haavapadja vahetamisel
- lihtne kasutada
- ei kahjusta haava ümbritsevat piirkonda

VÕIMALIKUD KÕRVALMÕJUD

Mee kõrge osmootse aktiivsuse tõttu, mis põhineb veemolekulide haavast väljaajamisel, võib pärast sideme haavale kandmist tekkida põletustunne või kerge valu, kuid see möödub tavaliselt 30 minuti kuni 2 tunni pärast. Väljakannatamatu valu korral lõpetage Vivamel algiinaat-haavapadja kasutamine. Kui toote kasutamise ajal ilmnevad tundmatud kõrvaltoimed, pidage nõu oma arsti või apteekriga või konsulteerige tootja või turustajaga.



KUIDAS KASUTADA VIVAMEL ALGINAT HAAVAPATJA?

1. Esmalt loputage haav leige jooksva joogivee või soolalahusega.
2. Kuivatage õrnalt haav ja selle ümbrus.
3. Võtke läbipaistva kaitsva kilega haavapadi steriilsest pakendist välja. Eemaldage padja ühelt küljelt kile ja asetage kileta pool haavale. Selle asetamisel jälgige, et haavapadi kataks kogu haava. Seda saab lõigata või voltida ja see võib ulatuda üle haava servade.
4. Eemaldage haavapadja teiselt poolt kaitsekile.
5. Kaitske haavapatja, asetades selle peale enda valitud teise imava toote. Väiksemate sekretsiooni koguste korral võib kasutada lausriidest kompresse. Suurema sekretsiooni kogusega haavade puhul kasutage hästi imavat haavapatja või polüuretaanvahtu. Kinnitage kindlalt sidemega, vältides haavapadja liikumist.
6. Vivamel alginaat haavapadja lihtsamaks pealekandmiseks kasutage steriilseid meditsiiniseadmeid, nt. steriilsed pintsetid või tangid. Padja saab lõigata steriilsete kääridega väiksemateks tükkideks, kui hoida kaitsev läbipaistev kile paigas.

KUI TIHTI PEAKS VAHETAMA VIVAMEL ALGINAT HAAVAPATJA?

Paranemisprotsessi alguses on soovitatav sidet vahetada iga kahe päeva tagant, suure sekretsiooni koguse korral isegi iga päev, sest mee mõju väheneb, kui see lahustub haavaeritises. Väga vähese sekretsiooniga haavad vajavad vahetamist vaid kaks korda nädalas. Iga kord enne sideme vahetamist eemaldage eelmisest sidemest allesjäänud alginaat või mesi ja visake see ära nagu ohtlikud jäätmed. Puhastage ja kuivatage haav ning asetage uus haavapadi vastavalt eespool kirjeldatud juhistele.



HOIATUSED

Ärge kasutage haavapatja, kui olete mee suhtes allergiline või kui teil on varem esinenud ülitundlikkusreaktsioon mee suhtes. Ärge kasutage haavapatja, kui pakend on kahjustatud või avatud. Ärge kasutage sidet, kui pakendi servad pole suletud. Kui alginaathaavapadi on avatud, ärge kunagi steriliseerige ega kasutage seda uuesti. Enne ja pärast haavapadja pealekandmist peske alati käsi. Haavapadi ei sobi söömiseks. Tarbimisel võib see põhjustada veresuhkru taseme tõusu diabeedihaigetel või ülitundlikkusreaktsiooni meeallergiaga inimestel. Vältida kokkupuudet silmade ja limaskestadega. Juhuslikul silma või limaskestale sattumisel loputada rohke veega. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kunagi kasutage kasutatud haavapatja. Kasutatud haavapadi ei sisalda mett või sisaldab seda vaid vähesel määral, mis vähendab selle toimet. Samuti väheneb kasutatud haavapadja puhul imavus. Haavapadja korduvkasutamine võib põhjustada toote või haava saastumist, võib-olla isegi infektsiooni. Kahel patsiendil ei tohi kunagi kasutada ühte sidet, et vältida toote või haava saastumist või isegi infektsiooni teket. Diabeedihaigete haavade paranemise kliinilised uuringud Vivamel meditsiinimeega näitavad väga positiivseid tulemusi, kuid ravi peab toimuma arsti järelevalve all. Sideme säilivusaeg on kolm aastat alates valmistamiskuupäevast. Pärast kõlblikkusaja lõppu ärge sidet kasutage ja visake see ära tavajäätmetena. Pärast neljanädalast ravi Vivamel alginaathaavapadjaga peab arst ravi üle vaatama.

VIVAMEL ALGINAT HAAVAPADJA HOIUSTAMINE

Hoida toodet kuivas kohas temperatuuril 5–35 °C horisontaalselt, vastasel juhul hakkab haavapadjast mett välja valguma. Vältige toote jätmist otsese päikesevalguse kätte.