

Mobilexi "topeltvolditud" DF kaldteed

Art. DF-180, DF-240 ja DF-300

Montage- und Gebrauchsanleitung

Montaaž ja paigaldusjuhend

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend ja manustamine



DF alumiiniumist kaldteed hõõrdepinnaga.

Transpordiks kokkupandud DF kaldteid saab transportida nagu kohvreid.



DF-kaldteed transpordiks kokkuklapitavad



DF kaldteed kasutusel



DF kaldteed koosnevad kahest keskelt hingedega kinnitatud kaldteest.



1. Sissejuhatus

See kasutusjuhend sisaldab meditsiiniseadme kirjeldust ja olulisi juhiseid korrektse ja tõhusa kasutamise tagamiseks.

toote ohutu kasutamine. Enne kasutamist on oluline see kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Eriti oluline on lugeda läbi ohutusnõuded ja neid järgida.

Me arendame pidevalt oma tooteid ja jätame endale õiguse muuta toodete spetsifikatsioone ja funktsioone ilma ette teatamata.

Seadme ettenähtud kasutus

Mobilex DF kaldteed on meditsiiniseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult ratastoolis või tõukerattaga patsientide abistamiseks. Need võimaldavad kõrgematest kohtadest (nt treppidest) läbimist abistaja abiga või ilma. Mobilex

Seega võimaldavad kaldteed patsientidel, kes istuvad puude tõttu ratastoolis, hoonetesse, autodesse, bussidesse jne siseneda või neist lahkuda. Kaldteid saab kasutada nii sise- kui ka välistingimustes. Igasugune muu kasutamine on keelatud.

Küsimuste korral võtke ühendust oma edasimüüjaga

--	--

2. Ohutusnõuded

- Veenduge, et kõik seadet kasutavad isikud loeksid seda kasutusjuhendit. Tootja ei võta endale vastutust vastutust kahjude ja/või vigastuste eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi eiramise tagajärjel.
- Kasutage toodet ainult laitmatus seisukorras.
- Defektide või vigade tuvastamisel peate viivitamatult ühendust võtma edasimüüjaga.
- Järgige toote etiketil olevat teavet.
- Kasutage toodet ainult kirjeldatud otstarbel.
- Vältige seadme konstruktsiooniliste muudatuste tegemist, kui teil pole tootja kirjalikku nõusolekut selliste muudatuste jaoks.
- Seadmel tehtavate erinevate seadistuste ajal peab kasutaja olema ettevaatlik, et ta ei pigistaks sõrmi või muud kehaosa seadme kahe liikuva elemendi vahel
- Seadet tohib kasutada ainult stabiilsel pinnal.
- Kaldteid ei tohi koormata rohkem kui tehnilistes andmetes ja etiketil kirjeldatud „maksimaalne koormus“.
- Kaldteed saab kasutada maksimaalse kaldega:
 - DF-180 36 cm**
 - DF-240 48cm**
 - DF-300 60 cm**
- Olge kaldtee kokku- ja lahtivoltimisel ettevaatlik. On oht, et sõrmed võivad osade vahele kinni kiiluda või neid lõigata.

3. Kirjeldus


Toote kirjeldus

Mobilex DF-kaldteed on alumiiniumist valmistatud kokkupandavad platvormid. Pind on kaetud spetsiaalse libisemisvastase materjaliga. Lihtsamaks käsitlemiseks ja transportimiseks on kaldteed jagatud kaheks kokkupandavaks pooleks, mida saab kokku panna.

SF-kaldteed tarnitakse karpides. Sisu on:

Mobilex DF kaldteed, vasakule ja paremale poole kasutusjuhend

Seadistamine ja funktsioonide kirjeldus

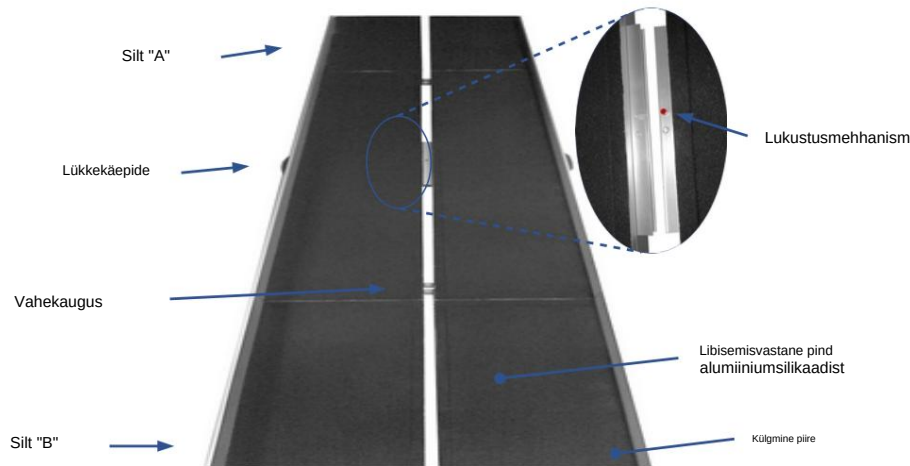

- Kaldteed on tähistatud siltidega **A** ja **B**.
- Silt **A** asetatakse kaldtee ülemisele küljele (takistusel olevale küljele).
- Silt **B** asetatakse kaldtee alumisele küljele (maapinna poole jäävale küljele).
- Kaldtee osad tuleb punaste vedrudega kokku paigaldada.
- Kaldtee tuleb paigutada nii, et kõrgem külgkaitse oleks väljapoole.
- Kaldtee tuleb asetada stabiilsele pinnale.
- Enne kaldteele sõitmist kontrollige, kas see on stabiilne ja kaldtee pooled on ühendatud.

Transpordisoovitused DF-tüüpi

alligaatori kaldteed saab transportimiseks kaheks pooleks lahti võtta ja (hingedega) kokku voltida. Veenduge alati, et et kaldtee oleks transportimise ajal tahtmatu liikumise eest ohutult kinnitatud.

Aksessuaarid

Alligator-kaldteede lisatarvikuid ei ole.

4. Tehnilised andmed

Mobilex DF-kaldteed	DF-180	DF-240	DF-300
Pikkus	180 cm	240 cm	300 cm
Laius (rööpa kohta)	79 cm	79 cm	79 cm
Pinna laius	75 cm	75 cm	75 cm
Külgkaitse kõrgus.	6 cm (sisemine)	6 cm (sisemine)	6 cm (sisemine)
Max. kõrgus / kõrgus	12° / 36 cm	12° / 48 cm	12° / 60 cm
Kaal (1paar)	16 kg	22 kg	27,2 kg
Maksimaalne koormus	300 kg	300 kg	300 kg
Kokkupandud suurus cm (P x L x K)	91 x 36 x 19	124 x 40 x 19	154 x 40 x 19

Toote etikett



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK - 8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk

Mobilexi toote nimi
EX. Välis- ja sisekasutuseks
Tootekood xxxxxx

Maks. 150 kg
Maks. laius = 63 cm
Korvi maksimaalne koormus = 5 kg

TOODETUD 12.11.2020
SEERIANUMBER 001

5 740001 403084

Toote etiketi pilt (mitte originaal)

5. Hooldus ja puhastamine

Tavapärase mustuse saab eemaldada tavaliste puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige tooteinfot ja kasutage ainult puhastamiseks ja desinfitseerimiseks sobivaid tööstuslikke puhastusvahendeid (ärge kasutage alkoholi sisaldavaid tooteid ega lahusteid ega abrasiivseid aineid).

Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele on toode kulumisohtlik. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt professionaalil kontrollida.

Kergema mustuse ja tolmu saab eemaldada niiske lapiga.

Tugevama mustuse saab eemaldada mittekorrodeeriva, õrna pesuvahendiga.

Kaldtee puhastamiseks võite kasutada ka aiavoolikut.

Soovitatav kasutusiga: Tavaliselt 10 aastat, olenevalt kasutusest.

Hoiatus



Pange tähele, et kui raam on painutatud või katki, ei tohi toodet taaskasutada, vaid see tuleb välja vahetada.

6. Taaskasutamine

Toode sobib taaskasutamiseks. Enne taaskasutamist, kui uus kasutaja võtab toote üle, tuleb toode kontrollida vastavalt punktile 5.

7. Kõige levinumad probleemid ja lahendused

Sümptomid	võimalik põhjus	Mida teha?
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee all olev pind ei ole tasane	Kontrollige kaldtee asendit. Pange see tasasel ja siledal pinnal
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee paigaldatakse pinnale tagurpidi	Kontrollige, kas silt A on kaldtee ülemises otsas ja silt B alumises otsas. Vajadusel parandage asendit.
Kaldtee ei avane	Lukustusrihm ei ole lahti	Keerake lukustusrihm lahti

8. Toote utiliseerimine

Toodet ei tohi olmeprügi hulka visata, vaid see tuleb viia kohalikku taaskasutuskeskusesse.

9. Garantiitingimused

Mobilex A/S pakub 2-aastast garantiid tootmisvigadest või materjalivigadest tingitud kahjustuste korral. Garantii on Garantii ei kehti toote mittesihipärase remondi või kasutamise korral. Garantii ei kata tavapäraselt kuluvaid osi, välja arvatud juhul, kui kulumine on põhjustatud tootmisveast. Kui toodet muudetakse ilma meie kirjaliku nõusolekuta, siis CE-märgis ja tootegarantii ei kehti. Käesoleva garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest otse oma edasimüüjat või Mobilex A/S-i. Garantii ei kata transpordikulusid ega...

Garantii ei kata kahjusid, mis on tekkinud isikuvigastuste või toote mittekasutamise korral remondi ajal.

