

KASUTUSJUHEND

Alumiiniumist ratastool

Tootekood: ELITE-TIM



1. Omadused

Ratastool on valmistatud kergest alumiiniumraamist. Sellel on ülesklapitavad ja reguleeritavad käetoed ning eemaldatav hingavast võrkkangast polsterdus. Ratastool on varustatud kiirvabastusmehhanismi, raskuskeskme reguleerimisega (ees ja taga), saatjapidurite ning kokkuklapitava seljatoega. Lisaks on olemas säärerihmad, kallutusvastased rattad, täiskummist 24-tollised tagarattad ja 8-tollised pöörlevad esirattad.

Komplekt sisaldab: ratastooli raam ratastega, polsterdus koos kotiga, jalatoed koos kaitserihmadega, kokkupanekuks ja lahtivõtmiseks võtmekomplekt, kallutusvastased rattad.

Ratastooli osad:

1. Käepide
2. Saatjapidurid
3. Seljatoe kokkuklappimise mehhanism
4. Kõrgusreguleeritav käetugi
5. Käetoe ülesklappimise nupp
6. Parkimispidur
7. Topeltraam
8. 8-tolline pöörlev esiratas raskuskeskme reguleerimisega
9. 24-tolline tagaratas raskuskeskme reguleerimisega, kiirvabastusmehhanismi ja käerõngaga
10. Kaitserihm
11. Jalaplaad
12. Jalatoe küljele pööramise lukk
13. Iste*
14. Seljatugi koos kotiga
15. Kallutusvastane ratas



* saadaval laiustes 44, 46 ja 49 cm

2. Kasutamine

Ratastool on mõeldud inimestele, kellel on liikumisraskused või vähene liikuvus. Seda ratastooli saab lükata ka saatja. Ratastool sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes.

3. Kokku panek

Samm 1. Ratastooli lahtivõtmine

Asetage ratastool põrandale. Avage ratastool, kasutades käetugesid. Seejärel vajutage istme külgedelt, kuni kõik osad haakuvad omavahel õigesti.

Samm 2. Seljatugi ja iste

Tõstke seljatugi üles ja lukustage see lukkudega, mis asuvad käepidemete all (punkt 3). Kinnitage polsterdus koos kotiga ratastoolile.

Samm 3. Jalatoed

Paigaldage jalatoed raami välisküljele. Seejärel keerake jalatoed sissepoole, kuni need lukustuvad.

Samm 4. Käetoed

Käetoed on kallutatavad. Nende tõstmiseks vajutage raamil (punkt 5) asuvat nuppu.

Samm 5. Jalatoe ja käetoe kõrguse reguleerimine

- Reguleerige jalatugesid kaasasoleva võtmekomplekti abil. Selleks keerake lahti jalatoe raamil olev kruvi. Jalaplaatide ja põranda vahele peab jääma piisavalt ruumi, sest liiga madal asetus võib raskendada kallakutel ja äärekividel liikumist. Jalaplaadid tuleks reguleerida nii, et keha ja reite vaheline nurk oleks 90° (kasutaja optimaalne istumisasend).
- Käetugede reguleerimiseks tõmmake reguleerimisklamber ja valige soovitud kõrgus. Mõlemad käetoed peavad olema samal kõrgusel.

Samm 6. Kaitserihmade paigaldus

Kinnitage kaitserihmad jalatugede külge, et vältida kasutaja jalgade libisemist jalaplaatidelt.

RATASTOOLI JA SELJATOE KOKKUKLAPPIMINE

Ratastooli saab uuesti kokku voltida, et seda oleks lihtsam transportida ja hoiustada.

- Keerake jalaplaadid küljele ja seadke need püstisesse asendisse või eemaldage need täielikult. Eemaldage istme ja seljatoe polster koos kotiga. Tõstke iste üles, haarates sellest eest ja tagant, kuni ratastooli raam on kokku volditud.
- Seljatoe kokkuklappimiseks vajutage samaaegselt lukustusmehhanisme, mis asuvad seljatoe taga käepidemete all, ja tõmmake seljatugi allapoole.

PARKIMISPIDUR

Rataste lukustamiseks suruge pidurihoob ettepoole, kuni ratas on täielikult blokeeritud (vasak ja parem ratas eraldi).

Tähelepanu! Parkimispidur on mõeldud rataste lukustamiseks ainult siis, kui ratastool on täielikult peatatud.

SAATJAPIDURID

Pidurite hoovad asuvad seljatoe taga, mõlema käepideme all.

- Ratastooli peatamiseks pigistage pidurihooba. Piduri vabastamiseks laske hoovast lahti. Tehke seda sujuvalt ja sobiva jõuga.
- Pidurid on varustatud ka parkimisfunktsiooniga. Selle kasutamiseks pigistage pidurihoova ülemist osa, kuni kuulete "klõpsu". Parkimispiduri vabastamiseks pigistage pidurihoova alumist osa.

PARKIMISPIDURI REGULEERIMINE

Parkimispiduri korrektne toimimine sõltub selle seadistusest ja asendist. Pidurihoob peab olema sellises asendis, et piduriklots blokeerib ratta kindlalt, ilma liigse vastupanuta.

- Kui tunnete liigset vastupanu, nihutage hooba veidi ettepoole, keerates lahti parkimispiduri küljes olevad kinnituskruvid. Asetage piduriklots selliselt, et see blokeeriks ratta kergesti, ilma liigse jõuta.
- Kui piduriklots ei puuduta ratast piisavalt ega lukusta seda, korrake ülaltoodud juhiseid, liigutades hooba vastupidises suunas.

4. Enne kasutamist

Samm 1. Ratastooli seisukorra kontroll

Kontrollige pidurite, konstruktsiooni ja rehvide seisukorda. Veenduge, et kõik komponendid oleksid õigesti kokku pandud ja reguleeritud.

Märkus! Ärge kasutage ratastooli, kui märkate mingeid defekte.

Samm 2. Parkimispiduri kasutamine

Lukustage rattad, kui sisenete või väljute ratastoolist.

Samm 3. Jalaplaadid

Jalaplaadid peavad ratastooli sisenemisel või väljumisel olema vertikaalses asendis. Ärge kasutage jalaplaate toetusena, kuna see võib põhjustada kukkumise. Pärast kasutaja üleviimist ratastooli voltige jalaplaadid lahti.

Märkus! Ärge astuge jalaplaatidele – on oht kahjustada neid.

Samm 4. Ratastooli sisenemine

Ratastool peaks olema võimalikult lähedal kasutajale ja puutuma vastu voodit või teist istet. Kui kasutaja ei saa iseseisvalt istet vahetada, tuleb teda abistada ratastooli siirdamisel.

Samm 5. Kasutaja asend

Kasutaja peaks istuma püstises asendis, põlved painutatud 90° nurga all.

Ratastool on kasutamiseks valmis.

5. Tehnilised andmed

Istme mõõtmed	44 / 46 / 49 x 43 cm
Kogulaius	61 / 63 / 66 cm
Kogusügavus	110 cm
Istme kõrgus maapinnast	46-49 cm
Käetoe kõrgus istmest	23-29 cm
Kogukõrgus	95 cm
Kaal	11,60 kg
Maksimaalne kandevõime	120 kg
Kokkupanduna mõõtmed	83 x 26 x 77 cm

6. Märkused

Timago International Group ei vastuta ratastooli ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ega väärkasutuse eest.

7. Puhastamine ja hooldus

Ratastooli osi tuleks regulaarselt hooldada:

- Polsterdust ja istmepatja võib puhastada niiske (mitte märja) lapiga, kasutades külma või sooja vett, ilma puhastusvahenditeta. Tugevad plekid võib eemaldada käsnaga. Ärge leotage polsterdust liigselt. Kuivatage eemal soojusallikatest.
- Plastikosi võib puhastada niiske lapiga ja vajadusel sobivate plastikupuhastusvahenditega. Sellisel juhul järgige tootja antud ohutus- ja kasutusjuhiseid.

8. Hoiustamis- ja transporditingimused

Seadet ei tohi hoida otsese päikesevalguse, vee ega niiskuse käes.

9. Garantiiteave

Kõik meie ettevõtte poolt turustatavad tooted on kaetud garantiiga, mille tingimused on kirjeldatud garantiikaardis, mis on kättesaadav meie veebilehel. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt ostsite toote. NB! Garantiinõuete esitamiseks tuleb alles hoida ostutõend (kviitung või arve).

10. Labels

	Viitenumber		Tootja
	Partii number (LOT)		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Meditiiniseade
	Märkus		Palun lugege kasutusjuhendit
	Tootja on kontrollinud vastavust olulistele meditsiiniseadmete nõuetele		

Meie täielik tootevalik on saadaval meie edasimüüjatelt. Lisateabe saamiseks külastage: **www.timago.com**. Aitäh, et valisite Timago!