

1. Sissejuhatus

Täname teid kvaliteetse Mobilexi toote ostmise eest. See kasutusjuhend sisaldab meditsiinitoote kirjeldust ja olulist teavet selle kasutamise kohta. Selle eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne toote kasutamist on väga oluline juhised hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhiste ja järgige neid alati. Mobilex püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja uuendada.

Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.

Toote sihtotstarve Kasutada ratastoolis

või rulaatoriga inimeste abistamiseks kõrgemate punktide läbimisel.

Näidustused

Kaldteed on mõeldud liikumispuudega inimestele, kes kõndimis-, seismis- või istumisraskuste tõttu on sunnitud kasutama liikumisvahendeid, nagu ratastoolid, tõukerulaatorit, rullaatorit jne. Kaldteed on ette nähtud arhitektuuriliste takistuste ületamiseks ühendades sujuvalt ratastoolikasutaja ületatavaid astmeid võimaldades seega ratastoolikasutajal jõuda kohtadesse, mis talle tavaliselt ligipääsmatud on. Kaldtee on mõeldud kasutamiseks iseseisvalt või saatja abiga. Kaldtee kasutamine muul otstarbel kui eespool nimetatud on keelatud.

Vastunäidustused

Vastunäidustusi ei saa siduda konkreetse kliinilise pildiga. Sobiva kaldtee tüübi ja pikkuse valik tuleb alati teha eriarsti või füsioterapeudi abiga. Järgige 2. peatükis toodud ohutusnõudeid.

Kasutusala

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

Meditsiinilised intsidendid ja soovimatud sündmused

Tootega seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüjaga:

2. Ohutusnõuded

- Veenduge, et kõik seadet kasutavad isikud on selle kasutusjuhendi läbi lugenud. • Tootja ei vastuta kahjustuste ja/või vigastuste eest, mis tulenevad juhiste eiramisest.
- Kasutage toodet ainult laitmatu seisukorras.
- Kui avastatakse vigu või defekte, peate viivitamatult ühendust võtma edasimüüjaga.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi. • Lugege toote etiketil olevat teavet. • Kasutage toodet ainult kirjeldatud otstarbel. • Vältige seadme konstruktsiooniliste muudatuste tegemist, kui teil pole tootja kirjalikku nõusolekut.
- Seadmel tehtavate erinevate seadistuste ajal peab kasutaja olema ettevaatlik, et ta ei vigastaks ennast
- Ärge asetage kaldteel kahe liikuva elemendi vahele sõrmi ega muid kehaosi.
- Seda toodet tohib kasutada ainult stabiilsel pinnal.
- Kaldteed ei tohi koormata suurema koormusega kui tehnilistes andmetes ja etiketil kirjeldatud maksimaalne koormus.
- Kaldteid saab kasutada takistuste ületamiseks maksimaalset kõrgustel:

SF-040	8 cm
SF-090	18 cm
SF-120	24 cm
SF-150	30 cm

- Olge kaldtee kokku- ja lahtivoltimisel ettevaatlik. On oht, et sõrmed võivad osade vahele kinni kiiluda või saada muljuda.

Tarnitavad osad Iga

tootepakend peaks sisaldama: 1 kaldteed ja 1 kasutusjuhendit.

Elkontroll Kontrollige karbi

sisu ülaltoodud nimekirja alusel. Kui avastate selles etapis, et mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke viivitamatult ühendust tarnijaga.

3. Kirjeldus

Tootekirjeldus SF-kaldteed

on alumiiniumist valmistatud kokkupandavad platvormid. Pind on kaetud spetsiaalse libisemisevastase materjaliga.

Kaldtee koosneb järgmisest:

1. Tipptasemel tugi
2. Silt A
3. Toote etikett
4. Kandekäepide
5. Külgkaitse
6. Alumiiniumsilikaadist libisemisvastane pind
7. Silt B



Funktsiooni kirjeldus

Kaldtee paigutamine

Asetage "A"-ga tähistatud külg takistuse pinnale ja "B"-ga tähistatud külg maapinnale. Veenduge, et kaldtee on stabiilne ja asetatud enne kasutamist stabiilsele pinnale.

Assamblee

See seade ei vaja kokkupanekujuhiseid.


Lisatarvikud

Selle tootega ei ole kaasas lisatarvikuid.

4. Tehnilised andmed

SF kaldteed	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Pikkus	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Laius	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Pinna laius	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Külgkaitse kõrgus.	--	6 cm	6 cm	6 cm
Max kõrgus / kõrgus	12° / 8 cm	12° / 18 cm	12° / 24 cm	12° / 30 cm
Kaal 10,5 kg	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Max koormus 300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Kokkupandult mõõdud cm (P x L x K)	45 x 37 x 5	90 x 40 x 10	120 x 40 x 10	150 x 40 x 10

Toote etikett

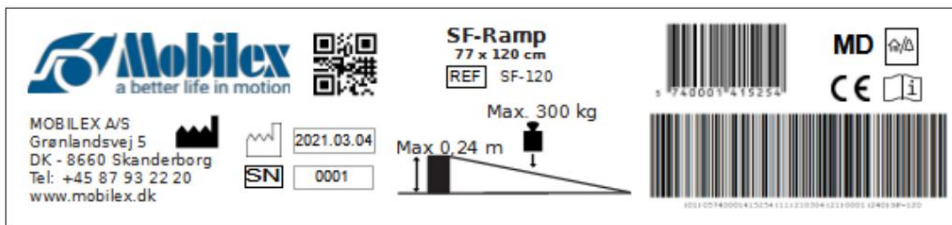

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Batch no/ serial no
	CE-marked product		Item Number
	To be used indoor and outdoor		Medical Device
	Max Elevation / height		

Toote etiketi näide

5. Hooldus ja korrrashoid

Tavalist mustust saab eemaldada tavaliste puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetse toote teavet ja kasutage ainult puhastamiseks ja desinfitseerimiseks sobivaid tööstuslikke puhastusvahendeid (ärge kasutage alkoholi sisaldavaid tooteid ja lahusteid või abrasiivseid).

Toode ei vaja põhimõtteliselt hooldust. Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele...

Toode kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt professionaalil kontrollida.

Soovitame järgmisi tegevusi:

- Toote puhastamine ja desinfitseerimine
- Raami/toodet tuleks kontrollida, kas see on painutatud, kahjustatud, kulunud või korrodeerunud
- Kuluvaid osi kontrollitakse ja vajadusel vahetatakse

Eeldatav kasutusiga: Tavaliselt 10 aastat, olenevalt kasutusest.

Säilitamine: Soovitame hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 kraadi, eemal otsesest päikesevalgusest.

Transport

Kaldtee saab lukustada kokkupandud asendisse. Seda tuleks transportida stabiilselt ja kindlalt, ilma et tekiks kukkumisoht. äkilised või ohtlikud liigutused transpordi ajal.

Ikonide tähendus

Taaskasutamine Toode sobib korduvkasutamiseks. Enne kui uus kasutaja toote üle võtab, tuleb seda punkti 5 kohaselt kontrollida.

6. Kõige levinumad probleemid ja lahendused

Probleemid	Võimalikud põhjused	Lahendused
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee all olev pind ei ole tasane	Kontrollige kaldtee asendit. Asetage see tasasele ja siledale pinnale.
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee on tagurpidi avatud	Kontrollige, kas kaldtee on õigesti paigutatud
Kaldtee ei avane	Lukustusrihm ei ole lõdvenenud	Keerake lukustusrihm lahti

7. Toote utiliseerimine

Toodet ei tohi olmeprügi hulka visata, vaid see tuleb viia kohalikku taaskasutuskeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S pakub 2-aastast garantiid tootmisvigadest või materjalivigadest tingitud kahjustuste korral. Garantii on ei kehti toote mittesihipärase remondi või kasutamise korral. Garantii ei kata tavapärase kulumisega osasid. välja arvatud juhul, kui kulumine on põhjustatud tootmisveast. Kui toodet muudetakse ilma meie kirjaliku nõusolekuta, siis CE-märgis ja tootegarantii ei kehti. Selle garantiiga kaetud tootekahjustuste korral palun teavitage otse oma edasimüüjat või Mobilex A/S-i. Garantii ei kata transpordikuluseid ega sisalda hüvitist isikukahjude või toote mittekasutamise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimise tõttu.