

1. Sissejuhatus

Täname teid kvaliteetse Mobilexi toote ostmise eest. Need kasutusjuhendid sisaldavad kirjeldust ja oluline teave meditsiinitoote kasutamise kohta. See on mõeldud selleks, et aidata teil toodet õigesti kasutada ja ohutult. Enne toote kasutamist on väga oluline juhiseid hoolikalt lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja uuendada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.

Toote kavandatud kasutusala

Kasutatakse ratastoolis või tõukerattaga inimeste abistamiseks kõrgemate punktide läbimisel.

Näidustused

Kaldteed on mõeldud liikumispuudega inimestele, kellel on kõndimis-, seismis- või istumisraskused. sunnitud kasutama liikumisvahendeid, näiteks ratastoole, tõukerattaid, rullatoreid jne. Kaldteed on näidustatud nende kõrvaldamiseks. arhitektuurilisi takistusi, ühendades sujuvalt ratastoolikasutaja poolt ületatavate tasemevahed ja seega need võimaldavad ratastoolikasutajal jõuda kohtadesse, mis talle tavaliselt ligipääsmatud poleks. Kaldtee on mõeldud kasutamiseks iseseisvalt või saatja abiga. Kaldtee kasutamine muul otstarbel kui eespool nimetatud on keelatud.

Vastunäidustused

Vastunäidustusi ei saa siduda kindla kliinilise pildiga. Sobiva kaldtee tüübi ja pikkuse valik peab olema alati eriarsti või füsioterapeudi abiga. Järgige 2. peatükis esitatud ohutusjuhiseid.

Kasutusala

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

Meditsiinilised intsidendid ja soovimatud sündmused

Tootega seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüja :

2. Ohutusnõuded

- Veenduge, et kõik seadet kasutavad isikud on selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kahjude ja/või vigastuste eest, mis tulenevad juhiste eiramisest
- Kasutage toodet ainult laitmatu seisukorras.
- Kui avastatakse vigu või defekte, peate viivitamatult ühendust võtma edasimüüjaga.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Seadmel tehtavate erinevate seadistuste ajal peab kasutaja olema ettevaatlik, et ta ei pigistaks
- Pöörake tähelepanu toote etiketil olevale teabele.
- Kasutage toodet ainult kirjeldatud otstarbel.
- Vältige seadme konstruktsiooniliste muudatuste tegemist, välja arvatud juhul, kui teil on tootja kirjalik nõusolek.
- sõrmei või muuid kehaosi seadme kahe liikuva elemendi vahel
- Seadet tohib kasutada ainult stabiilsel pinnal.
- Kaldteid ei tohi koormata rohkem kui tehnilistes andmetes ja etiketil kirjeldatud „maksimaalne koormus“.
- Kaldteid saab kasutada takistuste ületamiseks maksimaalse kõrgusega:

SC-045	9 cm
SC-060	12 cm
SC-090	18 cm
SC-120	24 cm
SC-150	30 cm
SC-180	36 cm

- Olge kaldtee kokku- ja lahtivoltimisel ettevaatlik. On oht, et sõrmed võivad osade vahele kinni kiiluda või neid lõigata.

Tarnitud osad

Iga tootepakend peaks sisaldama: 1 kaldteed ja 1 kasutusjuhendit.

Eelkontroll

Kontrollige karbi sisu ülaltoodud nimekirja alusel. Kui avastate selles etapis, et mõni osa on puudu või kahjustatud, võtke viivitamatult ühendust oma tarnijaga.


3. Kirjeldus

Toote kirjeldus

SC-kaldteed on alumiiniumist valmistatud kokkupandavad platvormid. Neil on libisemisvastane ribikujuline pind.

Kaldtee koosneb järgmisest:

1. Ülemine toetus
2. Kandekäepide (kaldtee all)
3. Külgkaitse
4. Libisemisvastane ribikujuline pind
5. Alumine toetus

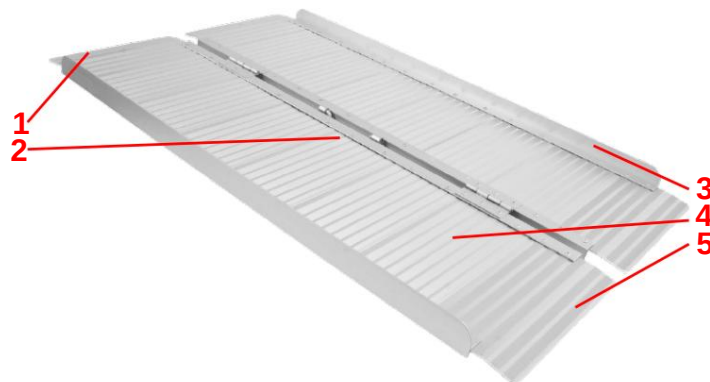

Funktsiooni kirjeldus

Kaldtee lahtivoltimine ja paigutamine

Asetage kaldtee maha ja voltige see lahti nii, et käepide on selle alumisel küljel.

Uuesti kokkuvoltimiseks tõmmake lihtsalt üks külg teise peale, nii et et kandekäepide on käeulatuses.

Kaldtee paigutamine

Asetage ülemine tugi tõstetud pinnale ja alumine tugi maapinnale. Veenduge, et kaldtee on stabiilne ja asetatud enne kasutamist stabiilsele pinnale.

See seade ei vaja kokkupanekujuhiseid.


Aksessuaarid

SC -045 kaldteele on saadaval transpordikott.

4. Tehnilised andmed

SC kaldteed	SC-045	SC-060	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Pikkus	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Laius	77 cm					
Pinna laius	76 cm					
Külgkaitse kõrgus.	3,5 cm					
Max. kõrgus	12° / 9 cm	12° / 12 cm	12° / 18 cm	12° / 24 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Kaal	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Max. koormus	300 kg					
Kokkupandult mõõtmised cm (P x L)	46 x 40 x 8	62 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

Toote etikett

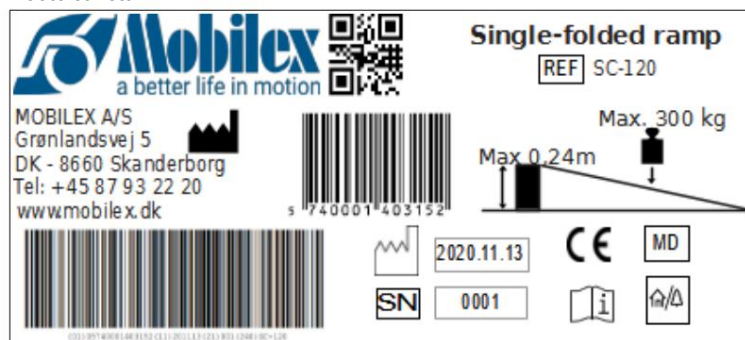

Toote etiketi näide

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Batch no/ serial no
	CE-marked product		Item Number
	To be used indoor and outdoor		Medical Device
	Max Elevation / height		

Ikoonide tähendus

5. Hooldus ja korrashoid

Tavalist mustust saab eemaldada tavaliste puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset toodet. teavet ja kasutage ainult puhastamiseks ja desinfitseerimiseks sobivaid tööstuslikke puhastusvahendeid (ärge kasutage alkoholi sisaldavaid tooteid ja lahusteid või abrasiivseid materjale).

Toode ei vaja põhimõtteliselt hooldust. Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele... Toode kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt professionaalil kontrollida.

Soovitame kontrollida järgmist:

- Toote puhastamine ja desinfitseerimine
- Raami/toodet tuleks kontrollida, kas see on painutatud, kahjustatud, kulunud või korrodeerunud
- Kuluvaid osi kontrollitakse ja vajadusel vahetatakse

Eeldatav kasutusiga: Tavaliselt 10 aastat, olenevalt kasutusest.

Säilitamine: Soovitame hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 kraadi, eemal otsesest päikesevalgusest.

Transport

Kaldtee saab lukustada kokkupandud asendisse. Seda tuleks transportida stabiilselt ja kindlalt, ilma et tekiks kukkumisoht. Vältida äkilisi või ohtlike liigutusi transpordi ajal.

Taaskasutamine

Toode sobib korduvkasutamiseks. Enne kui uus kasutaja toote üle võtab, tuleb seda punkti 5 kohaselt kontrollida.

6. Probleemid ja lahendused

Probleemid	Võimalikud põhjused	Lahendused
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee all olev pind ei ole tasane	Kontrollige kaldtee asendit. Asetage see tasasele ja siledale pinnale.
Kaldtee ei ole stabiilne	Kaldtee on tagurpidi avatud	Kontrollige, kas kaldtee on õigesti paigutatud
Kaldtee ei avane	Lukustusrihm ei ole lõdvenenud	Keerake lukustusrihm lahti

7. Toote utiliseerimine

Toodet ei tohi olmeprügi hulka visata, vaid see tuleb viia kohalikku taaskasutuskeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S pakub 2-aastast garantiid tootmisvigadest või materjalivigadest tingitud kahjustuste korral. Garantii on ei kehti toote mittesihipärase remondi või kasutamise korral. Garantii ei kata tavapärase kulumisega osasid. välja arvatud juhul, kui kulumine on põhjustatud tootmisveast. Kui toodet muudetakse ilma meie kirjaliku nõusolekuta, siis CE-märgis ja tootegarantii ei kehti. Selle garantiiga kaetud tootekahjustuste korral palun teavitage otse oma edasimüüjat või Mobilex A/S-i. Garantii ei kata transpordikulusid ega sisalda hüvitist isikukahjude või toote mittekasutamise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimise tõttu.