




Kasutusjuhend

Cloo

etac[®]
Creating Possibilities

78224 - 2025-06-09 - Version 11

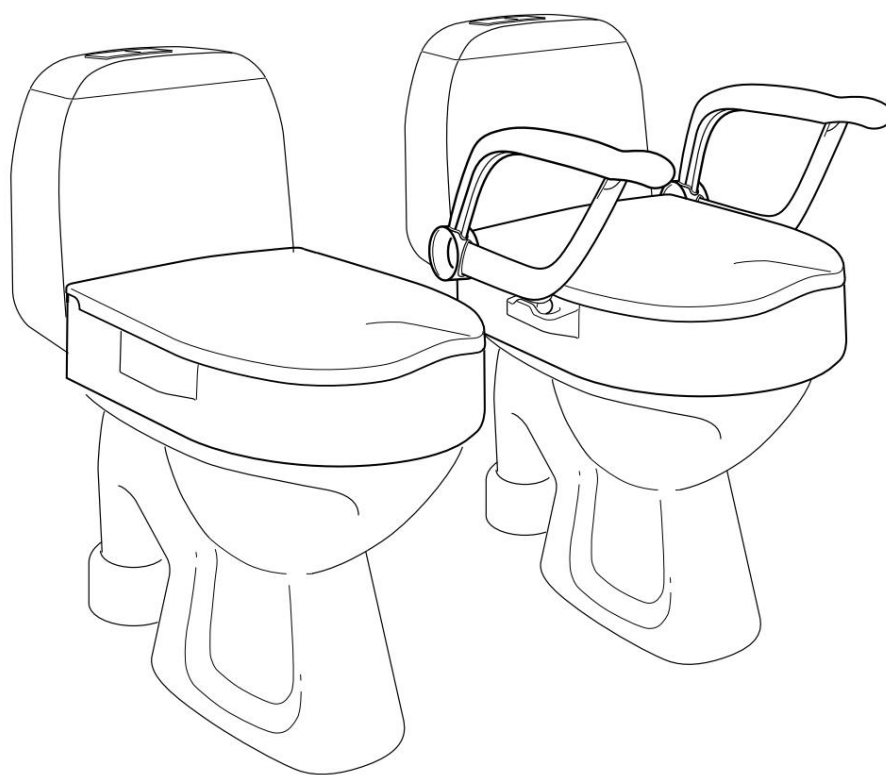

www.etac.com



MD



A





8030 1204

1


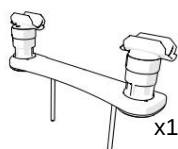
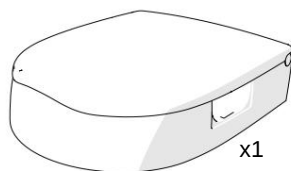


x1

8030 1214

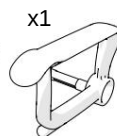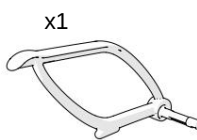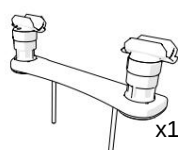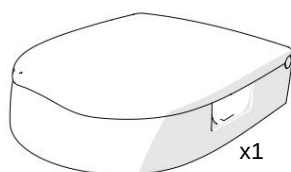

x1

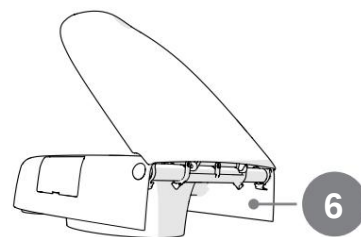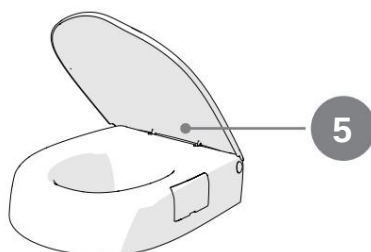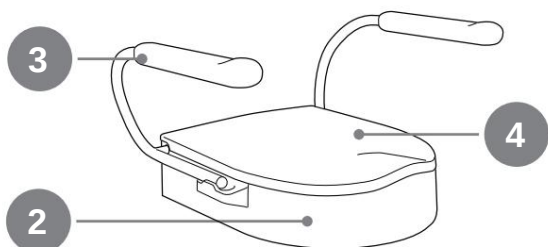

B

1



2



3



4



5



6




7




8



9

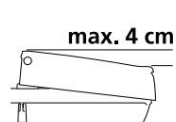

10

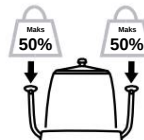

11



12



13



14



C

1 XXXXXXXXX
2 XXXXXXXXX








3 REF XXXXXXXXXX
4 SN XXXXXX



6 **UDI** *Vöökood GS1-128*
(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX(11)AAKKPP(21)XXXXXX

7 8 **CE** **MD**  Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
AAAA-KK-PP


5


D

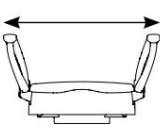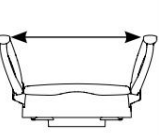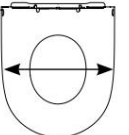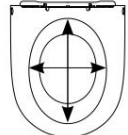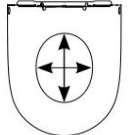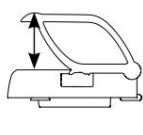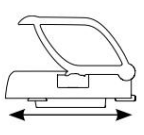								
80301204	-	-	400 mm	220/290 mm	195/240 mm	-	-	3,3 kg
80301214	590 mm	490 mm	400 mm	220/290 mm	195/240 mm	205 mm	460 mm	4,8 kg

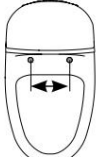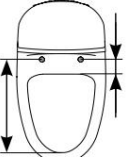
			 max kg lbs					
80301204	Maks. 185 mm	Minimaalselt 80 mm Maks. 345 mm	150 kg					
80301214	Maks. 185 mm	Minimaalselt 80 mm Maks. 345 mm	150 kg	50%				

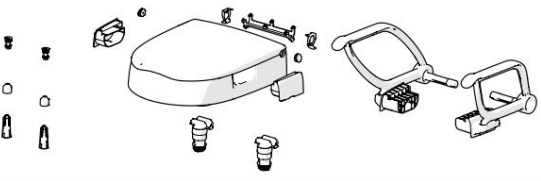







				
Fe	Al	PP	TPE	

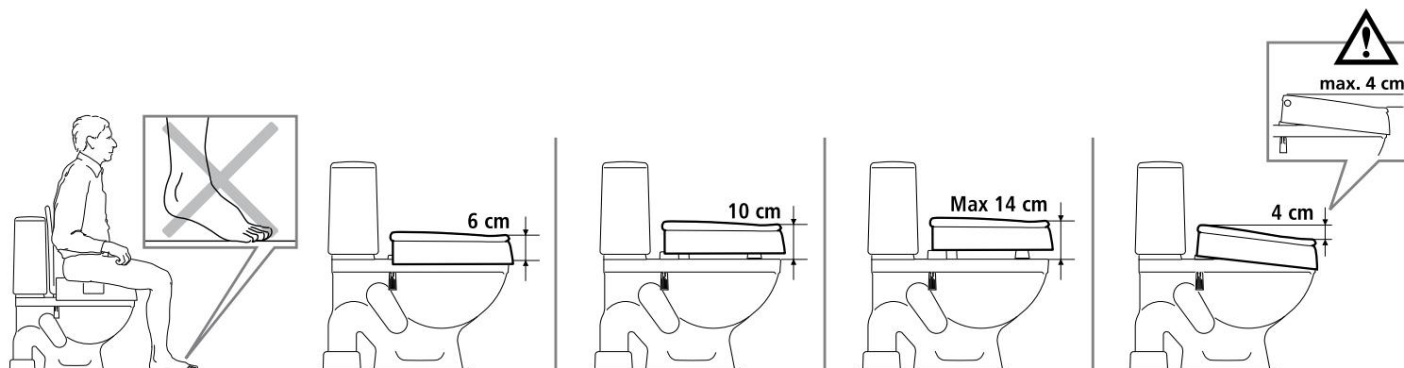




F

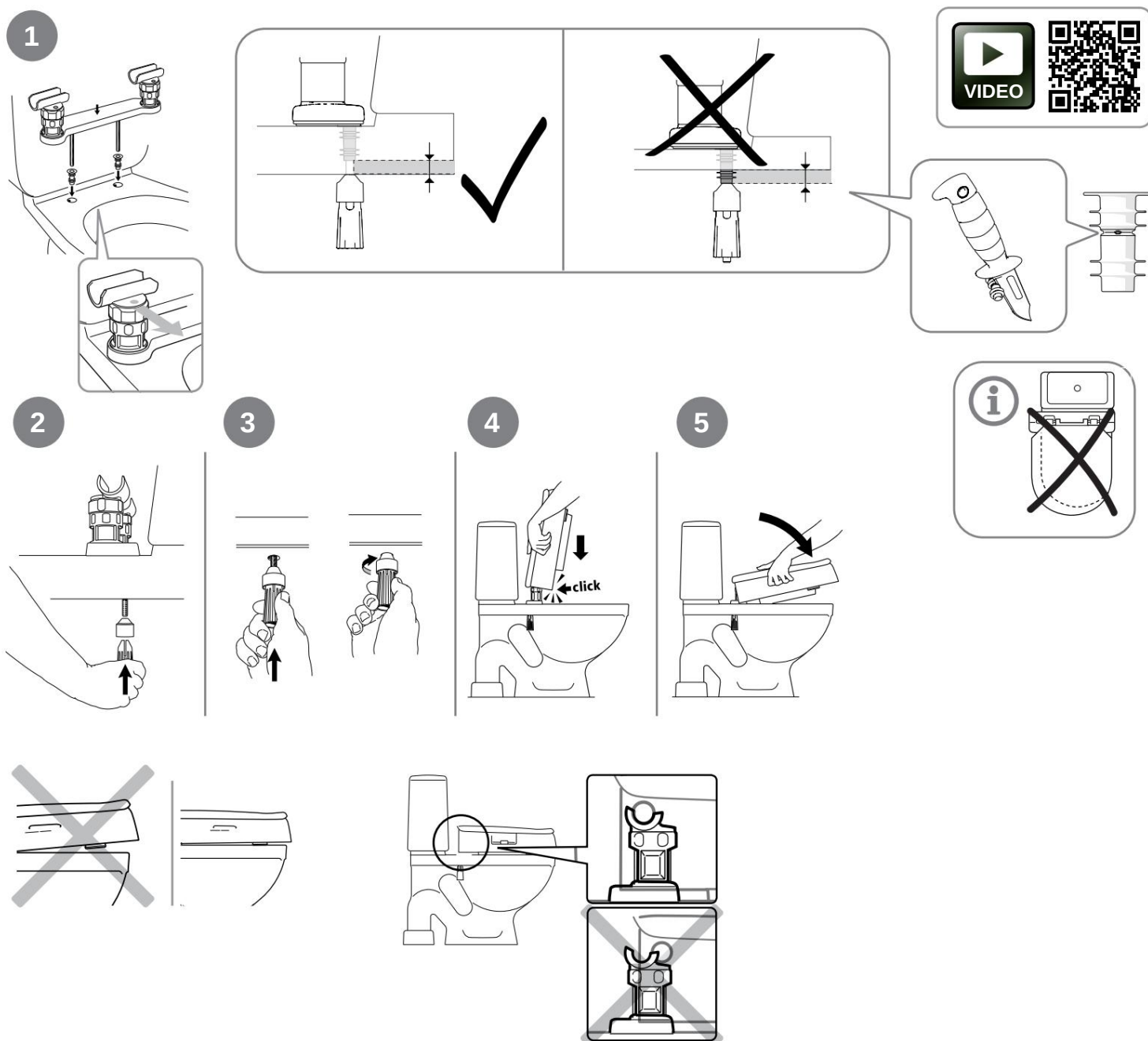




G

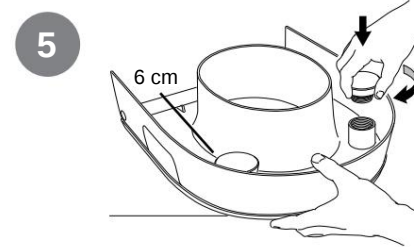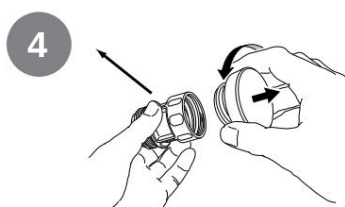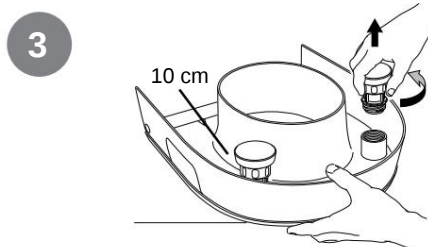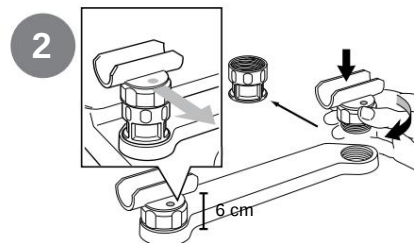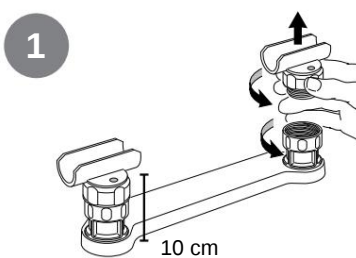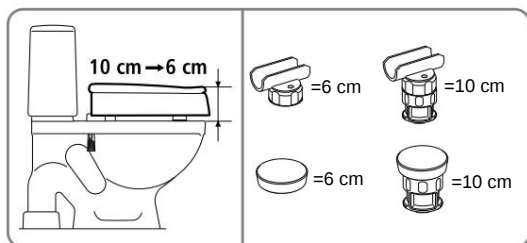




H

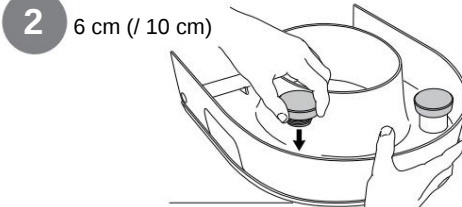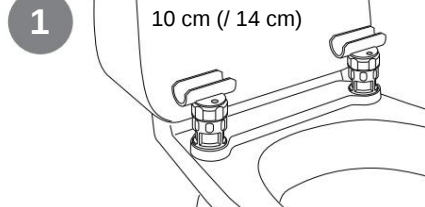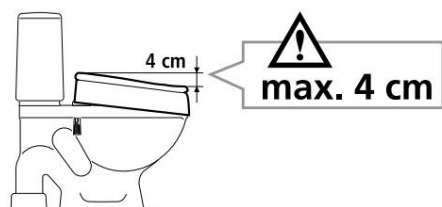

J

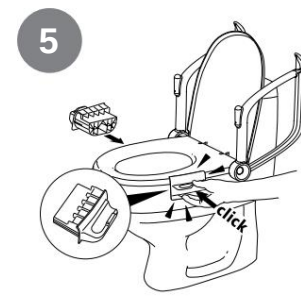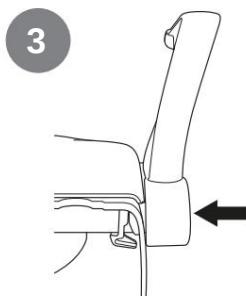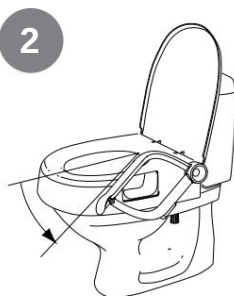

K

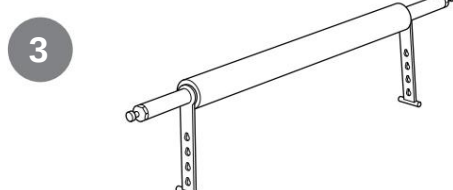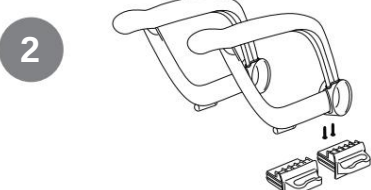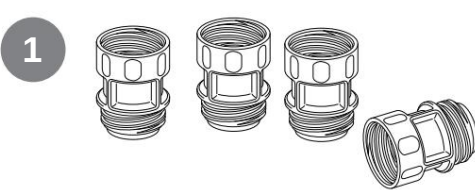



Täname teid Etaci toote valimise eest. Kahjustuste vältimiseks kokkupaneku, käsitlemise ja kasutamise ajal tuleks see kasutusjuhend läbi lugeda ja alles hoida. Selle leiate ka aadressilt www.etac.com

Siit leiate ka muud tootedokumentatsiooni, näiteks väljakirjutamise teabe, ostueelse juhendi ja taastamisjuhised. Kasutusjuhendis on Kasutaja puudega isik, kellele abivahend on mõeldud. Hooldaja on isik, kes Kasutajat abistab.

Toote kirjeldus

Cloo on kõrgusega reguleeritav tualettpott. Seda saab reguleerida kolmele erinevale kõrgusele ja ka ettepoole kallutada. Cloo'd saab kasutada ühe, kahe või ilma käetugedeta. Käetugesid saab eraldi üles pöörata.

Ettenähtud kasutus

Cloo (edaspidi ka toode) on meditsiiniseade, mis on ette nähtud vigastusest või puudest tingitud puude leevendamiseks või kompenseerimiseks. Toode on loodud selleks, et hõlbustada piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste ligipääsetavust tualeti külastamisel.

Tualett-istme tõste ja/või käetoed on mõeldud stabiilsuse ja toe pakkumiseks istudes ja püsti tõustes enne ja pärast tualeti kasutamist.

Sihtühik

Toote sihtühik põhineb inimese funktsionaalsel võimekusel, mitte konkreetsel diagnoosil, tervise seisundil või vanusel. Toode on mõeldud inimestele, kes on vähemalt 146 cm pikad ja kaaluvad vähemalt 40 kg. Teised kasutajad on tervishoiutöötajad, kes abistavad kasutajat, ja arstid/tehnikud, kes sellel seadeid teevad.

Kavandatud kasutajakeskkond

Toode on ette nähtud kasutamiseks siseruumides kodudes või asutustes ja sobib kasutamiseks vannitubades, kuid mitte basseinides ega sarnastes söövitavates keskkondades.

Kavandatud rakendus

Toode on mõeldud lühi- ja pikaajaliseks kasutamiseks ning seda võib kasutada mitu korda päevas. Toode on ette nähtud kasutamiseks terve nahaga kokkupuutel.

Toode on mõeldud taastamiseks ja taaskasutamiseks.

Oodatav eluiga

Eeldatav eluiga on 10 aastat.

Näidustused

Kasutamisnäidustus on funktsionaalne häire, sealhulgas, kuid mitte ainult, inimene, kellel on kõikuva tasakaalu probleemid, füsioloogiline ja/või funktsionaalne häire ja/või kukkumiste anamnees.

Vastunäidustused

Teadaolevaid vastunäidustusi ei ole.

Hoiatused

Hoiatused, mis kirjeldavad toote konkreetse toimingu või seadistusega seotud riskitegurit, leiate vastavast jaotisest.



Juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi.



Ärge seiske toote peal. Kehavigastuste oht.



Tualett-iste peab olema kindlalt pööranda külge kinnitatud.

Vastavusdeklaratsioon Toode vastab meditsiiniseadmete määrule (EL) 2017/745 nõuetele.

Toode vastab standardite EN ISO 10993-1 ja ISO 17966 nõuetele.

Eelmuügiinfo

Eelmuügiinfot leiate aadressilt www.etac.com.

Tõsine intsident

Kui toote kasutamise ajal tekib tõsine intsident, tuleb sellest viivitamatult teatada kohalikule edasimüüjale ja pädevale riiklikule asutusele. Kohalik edasimüüja edastab teabe tootjale.

Kohandamine

on kõik, mis ületab kasutusjuhendis toodud juhiseid ja sätteid. Kliendi poolt spetsiaalselt kohandatud toodetel ei pruugi olla Etaci CE-märgist. Etaci garantii on kehtetu.

Tootekirjeldus Joonis A

1. Tarne sisu **2.** Püstik **3.** Käetugi **4.** WC-poti kaas **5.** Toote etikett **6.** Artikli number

Sümbolid, sildid Joonis B

Kasutusjuhendis ja tootel olevad sümbolid:

1. Hoiatus, ettevaatusabinõu või piirang. **2.** Kasulikke nõuandeid ja näpunäiteid. **3.** Taaskasutatavad materjalid. **4.** Video vaatamiseks klõpsake ikooni või skannige QR-koodi. **5.** Kasutaja maksimaalne kaal (vt tehnilisi andmeid) **6-7.** Puhastamine (vt hooldus) **8.** Toote kaal **9.** Maksimaalne kalle 4 cm. **10.** Iga käetugi on konstrueeritud taluma maksimaalset koormust, mis moodustab poole kasutaja kaalust. **11.** Käetoe muljumisoht. **12.** Enne kasutamist lugege juhiseid **13.** Istmerõnga saab puhastamiseks lahti võtta. Kokkupanemisel veenduge, et see korralikult klõpsuga paika klõpsub. **14.** Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit (sinine ja valge).

Osa numbri sildi selgitus: Joonis C

1. Toote nimetus **2.** Toote kirjeldus **3.** Seerianumber **4.** Artiklinumber **5.** Tootja ja valmistamiskuupäev **6.** Võõtkood vastavalt standardile GS1-128 GTIN-14 ja seerianumber* **7.** CE-märgis. **8.** Meditsiiniseade

*Toote valmistamiskuupäeva saab lugeda tootel olevalt võõtkoodilt. Võõtkoodi all on sulgudes number 11. Nende sulgude järel olev numbrite kombinatsioon tähistab valmistamiskuupäeva.

Tehnilised andmed..... Joonis D

Kõrguse valimine.....Joonis E

Kokkupanek.....Joonis F

Seaded:

Kõrguse reguleerimine.....Joonis G

Kaldus asendJoonis H

KäetugiJoonis I

Fikseeritud kinnitus.....Joonis J

Hooldus

Puhastage toodet lahustivaba puhastusvahendiga, mille pH-väärtus on 5–9, või 70% desinfitseeriva alkoholiga.

Dekontaminatsioon: Vajadusel saab dekontamineerida maksimaalselt 85 °C juures 3 minuti jooksul.

Kasutatud materjalid on korrosioonikindlad. 5-aastane garantii materjali- ja tootmisdefektide vastu.

Tingimuste ja säetega saab tutvuda aadressil www.etac.com.

Säilitamine ja utiliseerimine

Toodet tuleb hoida siseruumides kuivas kohas temperatuuril üle 5 °C. Kui toodet on pikemat aega (rohkem kui neli kuud) hoiustatud, peaks enne kasutamist selle toimimist kontrollima ekspert.

Taaskasutatud vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Lisatarkvarad..... Joonis K

1. Klotsid 14 cm kõrguse jaoks. **2.** Käetoe komplekt.

Tarnitakse paarikaupa. **3.** Ristlattu



Pehme istme kasutamisel; pehme iste ei ole tualett-istme külge kinnitatud ja võib kasutaja külgligutuse korral oma kohalt liikuda.



Käetoe allaklappimisel on muljumisoht.



Defektiga toodet ei tohi kasutada. Kehavigastuste oht.