

KASUTUSJUHEND

Alumiiniumist ratastool

Tootekood: ACTIV-TIM



1. Teostus

Ratastool on valmistatud kergest alumiiniumraamist. Profileeritud, kallutatavate käetugedega ning valikulise hingavast materjalist (võrk tüüpi) polstriga (seljatugi ja iste). Ratastool on varustatud rataste kiiremaldamise ja raskuskeskme reguleerimise funktsiooniga, juhtiva isiku piduritega ning kokkupandava seljatoega. Sellel on turvavöö, kallutusvastased rattad, turvarihmad, tagarattad läbimõõduga 22", esirattad läbimõõduga 8". Saadaval ka 16" ja 24" ratastega versioonid.

Komplekti kuuluvad: käru raam ratastega, iste ja seljatugi, kasutajarihm, nutrivõtmete komplekt.

Valikuline lisavarustus: kallutusvastased rattad, turvarihmadega jalatoed, võrkpolster.

Ratastooli osad:



2. Kasutusotstarve

Alumiiniumist ratastool on abivahend iseseisva liikumisega probleeme omavatele ning liikumishäirete ja -piirangutega inimestele. Seda liigutatakse kasutaja käte lihasjõu abil või kaaslase poolt juhitud. Kasutatakse nii sise- kui välitingimustes.

3. Paigaldamine

1. samm Ratastooli avamine

Ratastool tuleb asetada maapinnale. Tõmmata ratastool käetugede abil lahti. Seejärel suruda iste keskelt kokku, nii et kõik osad omavahel sobituksid.

2. samm Seljatugi ja iste

Seljatugi tuleb üles tõsta ja juhtiva isiku käepideme all asuvate lukustustihvtidega lukustada. Seejärel tuleb paigaldada seljatoe ja istme polster.

3. samm Jalatoed

Paigaldada jalatoed ratastooli raami välisküljele ja keerata jalatugi kuni lukustumiseni sissepoole.

4. samm Käetoed

Käetoed on kallutatavad. Käetoe tõstmiseks tuleb vajutada ratastooli raamil (käetugede all) asuvat nuppu.

5. samm Jalatoe kõrguse reguleerimine

Jalatoed tuleb reguleerida jalatoe torul asuva kruvi lahti keeramise abil. Jätta jalatugede plaatide ja aluspinna vahele piisav vahemaa, sest jalatugede plaatide liiga madal paiknemine võib ratastooliga kõrgemate kohtade ja äärekivide ületamisel raskusi põhjustada. Jalatoed tuleb reguleerida nii, et kere ja reite vaheline nurk oleks ligikaudu 90° (kasutaja optimaalne istesend).

6. samm Turvarihmad

Kasutaja jalgade jalatugede plaatidelt maha libisemise eest kaitsmiseks kinnitage raami külge ohutusrihmad.

RATASTOOLI KOKKUPANEK

Ratastooli saab transportimise või hoiustamise lihtsustamiseks kokku panna. Enne käru raami kokkupanekut tuleb:

- Jalatoed laiali kallutada ja püstisesse asendisse seada.
- Polster eemaldada.
- Tõsta istet käepidemete abil ülespoole, kuni ratastooli raami kokkumine kuni.
- Seljatoe kokkupanekuks vajutada samaaegselt ratastooli taga olevate käepidemete all olevatele lukustuselementidele ja tõmmata seljatugi alla.

SEISUPIDURITE FUNKTSIOON

Rataste lukustamiseks lükata pidurihoobasid ettepoole, kuni ratas on täielikult lukustunud (eraldi vasakule ja paremale rattale). Pidada meeles, et seisupidurit kasutatakse ainult seisuajal rataste blokeerimiseks.

SEISUPIDURITE REGULEERIMINE

Seisupiduri õige toime sõltub selle reguleerimisest ja seadistusest. Pidurivarras tuleb seadistada nii, et pidurijalg blokeeriks ratast kindlalt ja hoob liigset vastupanu ei osutaks.

- Liigse vastupanu korral tuleb varrast lukustuskruiide abil ettepoole liigutada. Seadke pidur sellisesse asendisse, et see kergesti ja ilma vastupanuta ratast blokeeriks.
- Kui pidur täielikult rattaga kokku ei puutu ja seda piisavalt ei blokeeri, järgige ülaltoodud juhiseid ning liigutage pidurivarrast vastupidises suunas.

ABIPIDURITE FUNKTSIOON (JUHTIVALE ISIKULE)

Pidurihoovad asuvad ratastooli seljatoe taga, ratastooli mõlemal pool käepidemete juures.

- Pidurdamiseks suruda pidurihoob kokku ning vabastamiseks lasta see lahti. Toiming teostada sujuvalt ja sobiva jõuga.
- Piduritel on seisulukustus. Haarata pidurihoovast, suruda see kokku ja tõmmata lukustuselement (asub pidurikäepideme juures) tagasi.

4. Toimingud enne iga kasutust

1. samm Ratastooli seisukorra kontrollimine

Kontrollida pidurite, konstruktsiooni ja rehvide seisundit ning pöörata tähelepanu paigaldatud osade nõuetekohasusele ja nende õigele reguleerimisele.

Tähelepanu! Ükskõik milliste defektide või puuduste tuvastamisel ratastooli mitte kasutada.

2. samm Seisupidurite rakendamine

Ratastooli istumisel ja sealt väljumisel tuleb seisupidurid peale tõmmata.

3. samm Jalatugede paigutus

Ratastooli sisse- ja sealt väljaistumisel peavad jalatugede plaadid paiknema vertikaalselt. Ratastooli istumisel ja sellest väljaastumisel jalatugesid toena mitte kasutada, seoses ratastooli ümberkaldumise ohuga. Pärast ratastooli istumist laotada jalatugede plaadid laiali.

Tähelepanu! Jalatugedel mitte seista, seoses nende kahjustamise ohuga.

4. samm Ratastooli istumine

Ratastool peab patsiendi sisse istumise kohale võimalikult lähedal paiknema. Ratastool peab olema voodi või muu kasutatava istmega kokkupuutes. Kui kasutaja ei ole võimeline iseseisvalt ümber istuma, tuleb ta ratastooli tõsta.

5. samm Kasutaja asjakohane asend

Ratastoolis tuleb võtta sirgelt istumise asend, põlved 90 kraadise nurga all.

Ratastool on kasutusvalmis.

5. Tehniline spetsifikatsioon

Istme suurus	43 / 46 / 48 cm
Üldine laius	61 / 64 / 66 cm
Kogusügavus	109 cm
Kogukõrgus	92 cm
Istme kõrgus aluspinnast	50 cm
Ratastooli kaal koos ratastega	10,64 - 11,18 kg
Maksimaalne kandevõime	115 kg
Mõõtmed pärast kokkupanekut	106 x 29 x 92 cm

6. Märkused ja soovitused

Timago International Group ei vastuta ratastooli ebaõige kasutamise, ohutuseeskirjade mittejärgimise või mittesihtotstarbelise kasutamise eest.

7. Hooldamine

Ratastooli elemente tuleb regulaarselt hooldada:

- Polstrit ja patja võib puhastada külma või sooja veega, niiske (mitte märja) lapiga ning ilma pesuvahenditeta. Raskesti eemaldatavad plekid tuleb puhastada käsnaga. Polstri hooldamisel tuleb jälgida, et seda liigselt ei niisutataks. Kuivatada soojusallikatest eemal.
- Plastosad tuleb puhastada niiske lapiga, võimalusel plastmaterjalide puhastusvahendeid kasutades. Jälgida seejuures Tootja juhiseid ja pesuvahendite kasutamise ohutusnõudeid.

8. Hoiustamise ja transpordi tingimused

Toodet otsese päikesevalguse, vee ja niiskuse toimele mitte allutada.

9. Garantiandmed

Kõik meie ettevõtte poolt turustatavad tooted on hõlmatud garantiiga, mille tingimused on kirjeldatud meie veebilehel olevas garantiikaardis. Palume võtta ühendust müüjaga, kellelt toode osteti. Tuleb meeles pidada, et ostutõend (kviitung või arve) tuleb garantii tarbeks säilitada.

10. Märgistused

	Viitenumber		Tootja
	Seeria number		Tootmise kuupäev
	Seerianumber		Meditiiniline toode
	Tähelepanu		Tutvuge kasutusjuhendiga
	Tootja on meditsiinitoodete põhinõuetele vastavuse hinnangu teostanud.		