

KASUTUSJUHEND

Õhuga reguleeritav istmepadi ratastoolile

Tootekood: SIT-EXPERT



1. Omadused

Õhuga reguleeritav padi koosneb õhukambrist ja isetäituva juhtventiiliga. Padjal on eemaldatav kate koos kinnitusribaga, mis on valmistatud kahest erinevast kangast. Katte ülemine osa on veeauru läbilaskev ja niiskuskindel, alumine osa aga libisemisvastasest kangast, mis takistab padja liikumist istmepinnal. Tänu juhtventiilile täitub padi iseenesest. Õhukamber kohandub kasutaja kehakujuga, tagades mugavuse.

2. Kasutamine

Õhuga reguleeritav padi on mõeldud patsientidele, kellel on oht lamatiste tekkeks. Padja kasutamist soovitatakse isikutele, kes viibivad püsivalt istuvas asendis ja kellel esineb vereringehäireid perifeerses vereringesüsteemis. Padi sobib lamatiste ennetamiseks ja algstaadiumis raviks.

3. Enne esmakordset kasutamist

Samm 1. Asetage padi istmele nii, et libisemisvastane pool jääks alla.

Samm 2. Juhtventiiliga ava peaks olema istme eesosas.

Samm 3. Eemaldage padjalt kõik esemed.

Samm 4. Tõmmake ventiil katte esiosa avast välja ja veenduge, et see on täielikult välja tõmmatud.

Samm 5. Avage ventiil, keerates seda vastupäeva ja tõstes kergelt üles. Padi peaks ise täituma.

Samm 6. Kui padi on täitunud, sulgege ventiil, keerates seda päripäeva.

PADJA REGULEERIMINE

Samm 1. Istuge õhuga täitunud padjale.

Samm 2. Avage ventiil aeglaselt, kuni õhk hakkab väljuma. Õhuvoolu saab täiendavalt reguleerida:

a) Vajutage korgile, et vähendada õhuvoolu.

b) Tõstke kork üles, et suurendada õhuvoolu.

Samm 3. Laskke liigsel õhul väljuda, kuni kasutaja istub stabiilselt ja mugavalt.

Samm 4. Kui reguleerimine on lõpetatud, sulgege ventiil.

KATTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

Katete eemaldamiseks avage ventiil, avage tõmblukk ja võtke kate padjalt õrnalt maha. Katete tagasi panemiseks avage ventiil ja tõmmake kate padjale ventiili poolt. Seejärel viige ventiil ettevaatlikult läbi katte ava ja sulgege tõmblukk. Täitke ja reguleerige padi (vt PADJA REGULEERIMINE).

Märkus! Soovitatav padja paksus ei tohiks olla väiksem kui 1,5–2 cm.

4. Tehnilised andmed

Pikkus	43 / 46 cm
Sügavus	40 cm
Kõrgus	8 cm
Maksimaalne kandevõime	150 kg
Kaal	0,80 / 0,90 kg

5. Märkused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ega väärkasutuse eest.

6. Hooldus

- **Padja puhastamine:** Puhastage patja niiske lapiga ja kasutage õrna puhastusvahendit. Vältige padja läbimärjaks saamist. Kuivatage hoolikalt pärast iga puhastamist. Tugevad kemikaalid võivad toodet kahjustada. Tugevad plekid saab eemaldada käsitsi lokaalse pesuga.
- **Katete puhastamine:** Katet võib pesta pesumasinas 40 °C juures, kasutades õrna pesuvahendit. Enne pesemist sulgege tõmblukk. Katet võib kuivatada sooja õhuvooluga või madalal temperatuuril kuivatis.
- **Desinfitseerimine:** Desinfitseerige patja niiske lapi ja õrna desinfitseerimisvahendiga.

7. Hoiustamis- ja transporditingimused

Seadet ei tohi hoida otsese päikesevalguse käes ega vee või niiskuse käes.

8. Garantiiteave

Kõik meie ettevõtte poolt levitatavad tooted on kaetud garantiiga, mille tingimused on kirjeldatud garantiikaardil, mis on saadaval meie veebilehel. Palun pöörduge edasimüüja poole, kellelt toote ostsite. Pidage meeles, et garantii kehtimiseks tuleb alles hoida ostutõend (tšekk või arve).

9. Sildid

	Viitenumber		Tootja
	Partii number		UDI kood
	Seerianumber		Meditiiniseade
	Märkus		Palun lugege juhiseid
	Tootja on kontrollinud vastavust meditsiiniseadmete olulistele nõuetele.		