

# KASUTUSJUHEND

## Alumiiniumist neljarattaline rullator

Tootekood: YOLA AIR



### 1. Omadused

Neljarattaline rullator on valmistatud mati värviga kaetud alumiiniumist. Sellel on suured 12-tollise läbimõõduga täispuhutavad taga- ja esirattad, anatoomiliste käepidemetega reguleeritava kõrgusega käepidemed, fikseeritavad pidurid, reguleeritava kõrgusega seljatoega iste ja kott. Konstruktsioon põhineb ristraamil ja ovaalse ristlõikega torudel, tänu millele on aksiaalsurve vastupidavus oluliselt suurenenud. Rullator on varustatud kepi ja pudelihoidjaga mugavaks igapäevaseks kasutamiseks.

**Komplekt sisaldab:** raami istmega, esi- ja tagarattaid, seljatuge, kotti, kepihoidjat, pudelihoidjat, pumpa, kinnituskruvisid (2 tk).

### Rullaatori elemendid:

- A. Käepidemed
- B. Seisupidur
- C. Seljatoe kõrguse reguleerimine
- D. Käepidemega iste
- E. kott
- F. Kõrguse reguleerimine
- G. Kepi- ja pudelihoidja\*
- H. Kokkupaneku lukusti tagarataste jaoks
- I. Kinnituskruvid esirataste jaoks
- J. Tagumine ja eesimine 12" pumbatavad rattad

\* pudelihoidja asub teisel pool

raami osast, võrdluspildil pole nähtav



### 2. Taotlus

Rullaator on mõeldud liikumispuudega patsientidele, kes vajavad kõndimisel stabiilset tuge ja abi. Seda soovitatakse ka eakatele tasakaalu hoidmise abivahendina, et parandada kõndimismugavust ja tagada ohutus.

Käimisraami kasutamine mõjub positiivselt liikumis- ja püstiasendis püsimise toetamist vajavate probleemidega inimeste aktiivsuse taastamisele. See tagab kõndimise ajal parema stabiliseerimise, toe ja turvalisuse.

### **3. Kokkupanek**

#### **PAIGALDAMINE**

**1. samm.** Võtke rullator ja selle osad karbist välja.

**2. samm.** Paigutage esirattad õigesse asendisse (nagu on näidatud võrdluspildil) ja kinnitage need kinnituskruvidega. Tõmmake punast voltimismehhanismi (H) enda poole ja langetage tagarattaid, kuni kuulete iseloomulikku klõpsu.

**3. samm.** Sisestage käepidemed raami avadesse ja kinnitage need lukustustihvtidega.

**4. samm.** Rullaatori täielikuks lahtivoltimiseks haarake selle istmest ja tõmmake see laiali. Vajutage istmele mõlemalt poolt, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

**5. samm.** Kinnitage seljatugi, libistades see käepidemete all asuvasse spetsiaalsesse kinnitusse. Kinnitage kott rihmade abil rullaatori esiosa külge.

**6. samm.** Kinnitage kepihoidja ja pudelihoidja raami külge.

**7. samm.** Kontrollige, et rullaator on õigesti kokku pandud, täielikult lahti voltitud ja et ükski osa ega kruvi ei puuduks. Kui märkate kahjustusi või puuduvaid osi, võtke ühendust müüjaga.

**Rullaator on kasutusvalmis.**

#### **KOKKUPANDAV**

Rullaatori kokkuvoltimiseks korrake ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.

#### **SELJATOE KÕRGUSE REGULEERIMINE**

Seljatoe kõrguse reguleerimiseks keerake lahti seisupiduri all asuv plastist kruvi ja liigutage seljatuge soovitud kõrgusele. Seejärel pingutage plastist kruvi.

**Märkus!** Veenduge, et seljatoe mõlemad pooled oleksid samal kõrgusel.

#### **KÄEPIDEME KÕRGUSE REGULEERIMINE**

Käepideme kõrguse reguleerimiseks:

- Seisupiduri aktiveerimiseks ja liikumatuks muutmiseks vajutage pidurihoobasid alla.
- Vajutage raamil asuvat lukustustihvti ja reguleerige käepideme kõrgust.  
Tee sama teisel pool.
- Seejärel vabastage seisupidur.

**MÄRKUS!** Mõlemad käepidemed tuleks seada samale kõrgusele.

## PIDURIFUNKTSIOON

- Rullaatori peatamiseks tõmmake pidurihooba üles ja hoidke seda.
- Kui te ei liigu või istute, lukustage seisupidur, surudes pidurihooba allapoole.
- Seisupiduri vabastamiseks tõmmake käepidet ülespoole.

## 4. Tehnilised andmed

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Kogulaius                       | 68 cm      |
| Kogupikkus                      | 82 cm      |
| Istme laius                     | 46 x 25 cm |
| Istme kõrgus maapinnast         | 58 cm      |
| Käepideme kõrguse reguleerimine | 85–100 cm  |
| Rullaatori kaal                 | 11,50 kg   |
| Maksimaalne kasutaja kaal       | 136 kg     |
| Koti maksimaalne kaal           | 5 kg       |
| Raami värv                      | tumesinine |

## 5. Märkused

**Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ja väärkasutuse eest.**

## 6. Hooldus

- Puhastage raam niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt.
- Ärge kasutage tugevaid poleerimisvahendeid, kuna need võivad kahjustada kaitsekihti.
- Puhastage rullaatori liikuvaid osi (hinged, kinnitusdetailid) regulaarselt mustusest

## Rehvid

Rehve on soovitatav pumbata maksimaalselt 2,5 baari (36 PSI) rõhuni. Rõhku tuleks reguleerida vastavalt kasutaja kaalule ja õhutemperatuuri muutustele.

Rehvid võivad pikaajalise hoiustamise või mittekasutamise korral õhku kaotada. Kontrollige regulaarselt rehvirõhku ja kulumisastet. Kui rehvimustri sügavus on vähenenud 1 mm-ni, vahetage rehvid uute vastu. Rehvide täispumpamiseks järgige neid juhiseid:

## Kerge õhupuudus

- Suru rehvi kätega ühtlaselt vastu, et rehvi ja velg sobiksid ühtlaselt.
- Täida ratas soovitud rõhuni.

### b. Õhku pole

- Täitke ratas 30% ulatuses täis ja suruge rehvi ühtlaselt kätega nii, et rehvi ja velg sobiksid ühtlaselt.
- Täitke ratas soovitud rõhuni.

## 7. Säilitamis- ja transporditingimused

Toodet ei tohiks kokku puutuda otsese päikesevalguse, vee ega niiskusega.

## 8. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie veebisaidil oleval garantiikaardil. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostate. Pidage meeles, et garantii eesmärgil tuleb ostutõend (kviitung või arve) alles hoida.

## 9. Sildid

|                                                                                     |                                                                |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Viitenumber                                                    |  | Tootja                 |
|  | Partii number                                                  |  | Tootmiskuupäev         |
|  | Seerianumber                                                   |  | Meditsiiniseade        |
|  | märkus                                                         |  | Palun lugege juhiseid. |
|  | Tootja kontrollis oluliste meditsiiniseadmete nõuete täitmist. |                                                                                     |                        |



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12 43

-316 Bielsko -Białya, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



10/202 5 (II)