

KASUTUSJUHEND

Alumiiniumist 4-rattaline rulaator

Tootekood: YOLA

Tinago

1. Omadused

4-rattaline rulaator on valmistatud värvitud alumiiniumist. Sellel on ees- ja tagarattad läbimõõduga 8", kõrguse reguleerimisega käepidemed anatoomiliste haaratsitega, pidurid koos parkimisklambriga, reguleeritava kõrgusega seljatugi ja kott. Konstruktsioon põhineb ristiraamil ja ovaalse ristlõikega torudel, mis suurendavad oluliselt vastupidavust aksiaalsele survele. Rulaatoril on kepihoidja igapäevaseks kasutamiseks.

Komplekti kuulub: raam koos istmega, ees- ja tagarattad, seljatugi, kott ja kepihoidja.

Rulaatori osad:

- A. Käepidemed
- B. Parkimispidur
- C. Kõrguse reguleerimisega seljatugi
- D. Käepidemega iste
- E. Kott
- F. Kõrguse reguleerimine
- G. Kepihoidja
- H. Tagarataste kokkuklappimise mehhanism
- I. Esirataste kokkuklappimise lüliti
- J. Ees- ja tagarattad läbimõõduga 8"



2. Kasutamine

Rulaator on mõeldud patsientidele, kellel on liikumisvõime vähenenud ning kes vajavad kõndimisel stabiilset tuge ja abi. Samuti on see soovitatav eakatele inimestele tasakaalu hoidmiseks, kõndimise mugavuse suurendamiseks ja kukkumisohtu vähendamiseks. Rulaatori kasutamine mõjutab positiivselt liikumise ja püstitõusmise probleemidega inimeste aktiivsuse taastumist. See tagab parema stabiilsuse, toe ja turvalisuse kõndimisel.

3. Kokku panemine

KOOSTAMINE

Samm 1. Võtke rulaator ja selle osad kastist välja.

Samm 2. Pöörake esirattad, kuni kuulete iseloomulikku „klõpsu“ punaselt kokkuklappimise lülitilt (I). Tõmmake punast kokkuklappimise mehhanismi (H) enda poole ja laske tagarattad alla, kuni kuulete „klõpsu“.

Samm 3. Sisestage käepidemed raami avadesse ja kinnitage need lukustusnuppudega.

Samm 4. Rulaatori täielikuks avamiseks haarake istmest ja tõmmake väljapoole. Vajutage istet mõlemalt poolt, kuni see lukustub.

Samm 5. Kinnitage seljatugi, libistades see käepidemete all asuvasse spetsiaalsesse hoidikusse. Kinnitage kott rulaatori ette rihmade abil.

Samm 6. Kinnitage kepihoidja raamile.

Samm 7. Kontrollige, et rulaator oleks õigesti kokku pandud, täielikult avatud ja et puuduksid detailid või kruvid. Kui märkate kahjustusi või puuduvad osad, võtke ühendust müüjaga.

Rulaator on nüüd kasutamiseks valmis.

KOKKUKLAPPIMINE

- Rulaatori kokkuklappimiseks korrake ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.
- Vajutage esirataste kokkuklappimise lülitit (I), et rattad üles klappida.

SELJATOE KÕRGUSE REGULEERIMINE

Seljatoe kõrguse reguleerimiseks keerake parkimispiduri all olev polt lahti ja liigutage seljatugi soovitud kõrgusele. Seejärel keerake polt uuesti kinni.

MÄRKUS! Veenduge, et seljatoe mõlemad pooled oleksid samal kõrgusel.

KÄEPIDEMETE KÕRGUSE REGULEERIMINE

Käepidemete kõrguse reguleerimiseks:

- Vajutage pidurikangi alla, et aktiveerida parkimispidur ja lukustada rulaator.
- Vajutage raamil asuvat lukustusnuppu ja reguleerige käepideme kõrgus. Tehke sama ka teisel poolel.
- Seejärel vabastage parkimispidur.

MÄRKUS! Mõlemad käepidemed peavad olema seatud samale kõrgusele.

PIDURI FUNKTSIOON

- Rulaatori peatamiseks tõmmake pidurikang üles ja hoidke.
- Kui rulaator ei liigu või kasutate istet, aktiveerige parkimispidur, tõmmates pidurikangi alla.

- Parkimispiduri vabastamiseks tõmmake kang uuesti üles.

4. Tehnilised andmed

Üldlaius	65 cm
Üldpikkus	69 cm
Iste laius	46 x 25 cm
Iste kõrgus maapinnast	55 cm
Käepidemete kõrguse reguleerimine	81-97 cm
Rulaatori kaal	8,20 kg
Maksimaalne kandevõime	136 kg
Koti maksimaalne kandevõime	5 kg
Raami värv	matt must, türkiissinine, hall

5. Märkused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete rikkumise või väärkasutuse eest.

6. Hooldus

- Puhastage raam niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt.
- Ärge kasutage tugevaid poleerimisvahendeid, kuna need võivad kahjustada kaitsekatet.
- Eemaldage regulaarselt mustus rulaatori liikumatelt osadelt (hinged, pingutuskruvid, lukud).

7. Hoiustamis- ja transporditingimused

Seadet ei tohi hoida otsese päikesevalguse käes ega vee või niiskuse käes.

8. Garantiiteave

Kõik meie ettevõtte poolt levitatavad tooted on kaetud garantiiga, mille tingimused on kirjeldatud garantiikaardil, mis on saadaval meie veebilehel. Palun pöörduge edasimüüja poole, kellelt toote ostsite. Pidage meeles, et garantii kehtimiseks tuleb alles hoida ostutõend (tšekk või arve).

9. Sildid

	Viitenumber		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Meditiiniseade
	märkus		Palun lugege juhiseid.
	Tootja kontrollis oluliste meditsiiniseadmete nõuete täitmist.		



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2025 (II)