



Kasutusjuhend

Elektriline ratastool IMPERIUMI

0815013



Proloog

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.

See kasutusjuhend sisaldab toiminguid, kokkupanekumeetodeid ja lihtsat tõrkeotsingut.

See kasutusjuhend kehtib mudelitele: 0815013

See juhend sisaldab ratastooli hooldus- ja kontrollimeetodeid. Palun asetage see nähtavale kohale, et saaksite seda vajaduse korral hõlpsalt kasutada.

Andke see kasutusjuhend teistele inimestele kasutamiseks, kui nad seda ratastooli hakkavad kasutama.

Selle juhendi märkused ja pildid võivad kvaliteedi parandamise või disainimuudatuste tõttu tegelikest osadest veidi erineda. Palun lugege seda hoolikalt.

Teie käes olev ratastool võib erineda järgmistel fotodel kujutatust.

Kokkupanekuprotsess on sarnane.

Kahtluste või küsimuste korral võtke ühendust edasimüüjaga.

Mis tahes sõiduki ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi.

Hooletu juhtimine võib kahjustada nii ennast kui ka teisi.

Elektriline ratastool on mõeldud kõndimisraskustega või kõndimisvõimetute inimeste mugavaks transportimiseks.

Elektriline ratastool on mõeldud ainult ühe inimese transportimiseks .

Selles juhendis kasutatud sümbolid:



Hoiatussümbol

Järgige hoolikalt selle sümboli kõrval olevaid juhiseid.

Juhiste eiramine ja nende eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada ratastooli või keskkonda.

1. Tootekirjeldus

1.1 Toote pilt

VIIDE: 0815013



1.2 Tooteinfo

0815013	SPETSIFIKATSIOONID
Raam	Alumiinium, Kohandatav
Kontroller	Paremale või vasakule reguleeritav kontroller, dünaamiline, DC 60A
Mootor	450W x 24 V x 2
Aku	2 tk x 12V 50Ah, pliiakud
Laadija	24 V 8 A
Maksimaalne kiirus	8–10 km/h
Autonoomia*	30–35 km
Maksimaalne kalle	10 kraadi
Esirattad	9", täispuhutav
Tagumised rattad	14", täispuhutav
Küljetoed	Eemaldatavad ja reguleeritav laiuse (48–51 cm) ja kõrguse (16–24 cm) suhtes
Jalatugi	Alumiiniumist, eemaldatav, kõrgus ja pikkus reguleeritav
Iste	Eemaldatav nailonvõrgust kangast padi mäluvahust polstriga
Pidurid	Elektromagnetiline pidur
Muud omadused	Poritiivad, turvavöö, 3- tollised ümberkukkumisvastased rattad, reguleeritav peatugi, reguleeritav seljatugi, elektriline istme kallutus, signaal, esi- ja tagatuled (suuna- ja pidurituled), esi- ja tagasuunatud koos alarmfunktsiooniga

*ligikaudne sõiduulatus, kuna see sõltub ka reisija kaalust, aku seisukorrast, ümbritseva õhu temperatuurist, sõidustiilist, maastikust ja tuule kiirusest

42,5-57,5 cm	40–50 cm	Reguleeritav sügavus kolmes asendis 45 cm 47,5 cm 50 cm	60 cm	60–69 cm	79-105,5 cm	127 cm	50 cm	14" 9"	150 kg	60 kg (ilma akudeta), 87 kg (akudega)

Toote toimivus

See mootoriga elektriratastoolide seeria töötab akuga. Kasutajad saavad suunda ja kiirust juhtida juhtkangi abil. See sobib madalatel kiirustel sõitmiseks siledatel teedel ja laugjatel nõlvadel.

Peamine struktuur

See elektriliste ratastoolide seeria koosneb peamiselt kahest osast:

- 1) Raamiosa: raam, ratas, jalatugi, käetugi, seljatugi jne.
- 2) Elektriline osa: kontrolleri, mootori, aku.

Kasutusala

Meie elektriline ratastool on mõeldud puuetega inimestele ja eakatele, kes kasutavad seda transpordivahendina. Välistingimustes sobib see keskmiste vahemaade läbimiseks. Maanteel kasutamiseks see ei sobi.

2. Ohutusjuhised

2.1 Juhtimisvalvsus

Üldised sõiduhoiatused

Ratastooli juhtimiseks hoidke käsi käetugedel.

Harjuta parkides või muudes turvalistes avatud kohtades, kuni suudad ratastooli oskuslikult kasutada.

Harjuta sõitmist turvalises kohas, et saaksid mugavalt igas suunas liikuda.

Järgige rangelt jalakäijate liikluseeskirju ja ärge pidage ennast sõidukijuhiks.

Sõida kõnniteel ja ülekäigurajal. Ära sõida sõiduteel.

Sõitke sirgelt ja kindlal kursil, vältides järske pöördeid.

Hoidke õiget rehvirõhku. Vale rehvirõhk võib põhjustada ebastabiilse sõidu või suurenenud aku energiakulu.

Hooldajate saatel või juhtimise vältimine nendes tingimustes

Sõitmine halbades ilmastikutingimustes, näiteks viimas, tihedas udus, tugevas tuules, lumes jne.

Kui ratastool on märg, pühkige vesi kohe ära.

Sõitmine ebatasasel teel, kus on muda, liiv, kruus jne.

Sõitmine tiheda liiklusega teel.

Sõitmine teel, millel puudub teeäärne kaitse.

Sõitmine raudteerööbaste lähedal.

Raudteed ületades veenduge, et see on ohutu ja et rehvid ei jääks rööbastele kinni.

Elektriline ratastool on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks, sellega ei tohi vedada inimesi ega kaupu .
ja see ei ole ette nähtud pukseerimiseks.

Ettevaatusabinõud üles- ja allamäge sõitmiseks

Vältige järskudel nõlvadel sõitmist. Nõlvade kalle peaks olema kuni 10 kraadi.

Jätkake üles- või allamäge sõites edasiliikumist.

Mäest alla sõites hoidke madalat kiirust.

Treppidel sõitmine on keelatud.

Välgi teeauke.

Ettevaatusabinõud kaaslastele

Saatjad peaksid veenduma, et kasutajate jalad on jalatugedel õiges asendis.

Kasutaja ohutuse huvides peaksid saatjad järskudel teedel ratastooli käsitsi juhtima.

2.2 Muu teave

Remont ja modifitseerimine

Kui on vaja remonti või muudatusi teha, võtke ühendust edasimüüjaga. Ärge tehke ise muudatusi, see võib põhjustada õnnetuse või rikke.

Kaitske keskkonda

Keskkonna kaitsmiseks ärge visake ratastooli ja akut ära. Uue aku saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

Hoidke hoiukeskkond kuivana.

Ärge hoidke ratastooli niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas. Kui ratastool saab märjaks, pühkige vesi kohe ära.



Ärge vahetage osi ega riistvara suvaliselt.

Ärge lisage kaalu suvaliselt, et vältida tasakaalustamatust.

Ärge kasutage ratastooli vedamiseks ega lükkamiseks teist sõidukit, kui keegi istub ratastoolis või kui ratastool on manuaalrežiimis. Kahtlase heli korral võtke viivitamatult ühendust edasimüüjaga.

Kaitse elektromagnetiliste häirete eest

Ratastooli tuleks hoida eemal tugevatest magnetväljadest ja suurtest induktiivsetest elektriseadmetest. Pöörake sellele tähelepanu, kui läheduses on elektromagnetiliste häirete allikaid, et viibiks neist allikatest võimalikult kaugel.

3. Ratastooli lahti pakkimine

- Ava kast.
- Eemaldage seljatoepadi, istmepadi, peatugi ja lisatarvikute karp.
- Avage ratastool
- Reguleerige seljatuge



- Reguleeri seljarihmasid
- Paigaldage seljatoepadi ja istmepadi.
- Paigaldage kontrolleri soovitud kohta.



- Avage lisatarvikute karp ja asetage peatoe toru raamile.
Reguleerige peatoe asendit.




- Paigaldage jalatoed.



Kontrolleri reguleerimine ja seadistamine

Reguleerige kontrolleri oma ideaalsesse asendisse, järgides neid samme:

- Keerake lahti käetoetugitoru kruvi (A).
- Reguleerige juhtnupp sobivasse asendisse.
- Pingutage kruvisid.
- Seejärel saate juhtnupu nurka reguleerida
- liigutades juhtnuppu ringikujuliselt väljapoole
- Samal ajal saate kruvi lahti või kinni keerata, et takistust reguleerida.

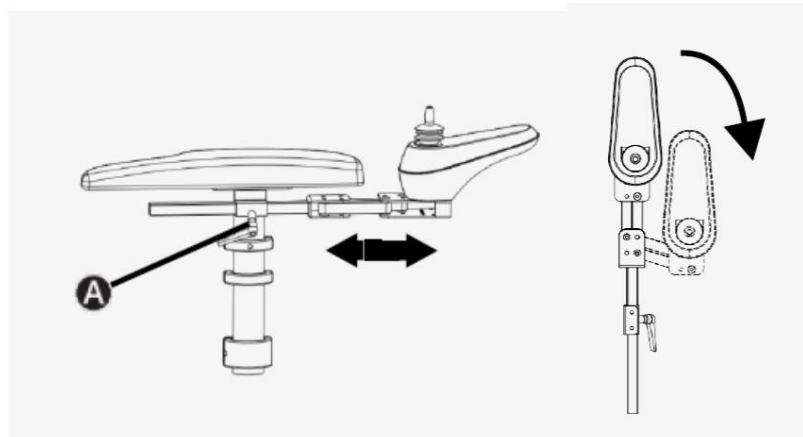


Jalatoe kokkupanek ja eemaldamine Asetage jalatugi ratastooli raamile sobivasse kohta ja liigutage seda väljastpoolt sissepoole. Jalatoe eemaldamiseks tõstke lukustit keerake väljapoole ja tõstke jalatugi üles.

Kõrguse reguleerimine

1. Keerake lahti jalatoetugitoru kruvi (A).
2. Reguleerige jalatugi sobivale kõrgusele ja pingutage kruvi.

Jalatoe nurga reguleerimine

1. Pöörake jalatuge ülespoole.
2. Keerake lahti lukustusmutter (B).
3. Pöörake kruvi üles või alla, kuni pedaal saavutab sobiva nurga.
4. Pingutage lukustusmutter.

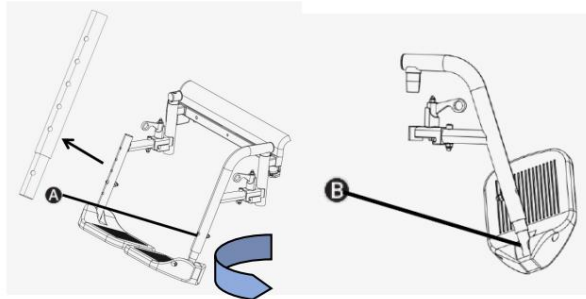

Kallumisvastaste rataste reguleerimine ja reguleerimine


Reguleerige rataste nurka, keerates mutrit lahti.



Turvavöö

Kinnitage kindlasti turvavöö. Istmeraami mõlemal küljel on abijuhttrööbas, kuhu saate turvavöö paigutada.

1. Kinnitage turvavöö juhttrööpa ülemisse soonde.
2. Veenduge, et turvavöö pannaal on korralikult lukus.
3. Turvavöö avamise sammud on näidatud alloleval joonisel järjekorras.

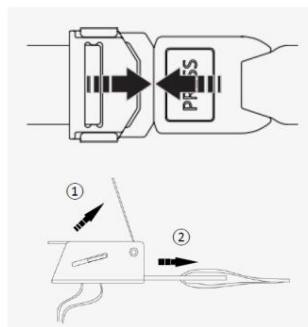

Manuaalselt režiimilt elektrilisele režiimile üleminek


Toode on varustatud hoobadega käsitsi ja elektrilise režiimi vahetamiseks. Kui hoob vabastatakse, eraldatakse pidur mootorist. Käsitsi režiimis ei saa toodet elektrooniliselt juhtida.

Manuaalne režiim:

1. Veenduge, et elektriline ratastool oleks tasasel pinnal.
2. Lülitage see välja.
3. Keerake hoovad sissepoole.


Elektrirežiim:


1. Lülitage elektriline ratastool välja.
2. Keerake hoovad väljapoole.

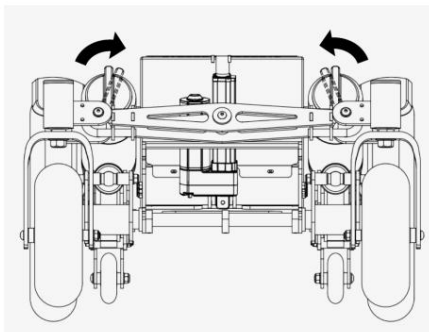

Seljatoe nurga reguleerimine


Seljatoe kallet saab reguleerida noolega näidatud mehhanismi abil, tõmmates välja seljatoe taga asuvat rihma, ja seda saab reguleerida 90°/100°/110°/120° nurga alla. Kui ratastooli on vaja kokku voltida, saab seljatuge ka ettepoole pöörata, et see tihedalt vastu istmepatja toetuks, vähendades seeläbi ratastooli mahtu.

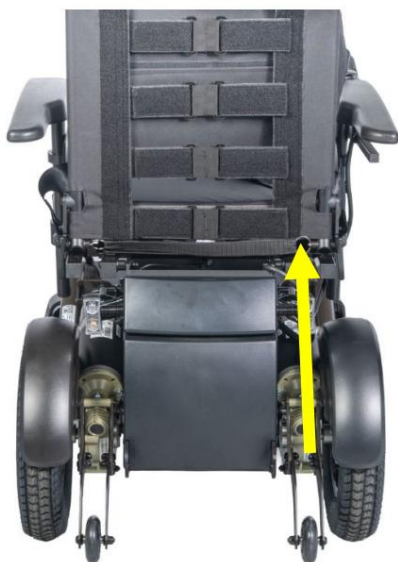

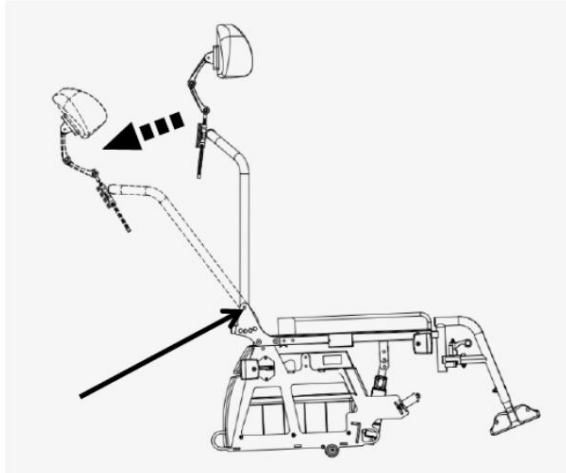

Elektriline istme kalde reguleerimine

Istme kalde reguleerimine (0° – 28°) pöörab kogu ratastooli istet, sealhulgas seljatuge, istet ja jalatugesid. Kui istme kaldenurk on muudetud siis lülituvad sisse ohutuled ja kallakul vähendatakse ratastooli maksimaalset kiirust automaatselt või piiratakse ratastooli sõiduvõimet täielikult.

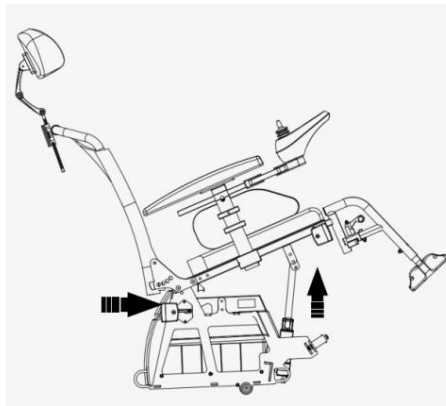

Istme laiuse ja sügavuse reguleerimine

Istme sügavust saab reguleerida kolme asendisse: 45/47,5/50 cm, muutes seljatoe asendit.

Kasutades allpool punaste nooltega näidatud mehhanismi saab

istme laiust alloleva mehhanismi abil reguleerida 40–50 cm. Istme laiuse reguleerimisel keerake kõigepealt lahti istmepinna all olevad kruvid ja seejärel tõmmake istmeplaati mõlemalt poolt, nagu alloleval pildil näidatud.



4 Aku ja laadija

4.1 Aku ühendamine

Aku paigaldamine



ASETA AKU RAAMILE



TÕSTA AKU RATASTOOLI
SIINIDELE



FIKSEERI AKURAAM



ÜHENDA PISTIKUGA
TOITEALLIKAS
JA RATASTOOL



FIKSEERI TAKJAPAELAGA
TOITEKAABEL



AKU ON PAIGALDATUD



PAIGALDA
AKUKATE
(ALUMINE)



PAIGALDA
KATE
(ÜLALEMINE)

Patareide eemaldamine



EEMALDAGE ÜLEMINE AKUKATE, HOIDES
SELLE ÜLEMISEST ÄÄREST JA VAJUTA ALLA



EEMALDAGE ALUMINE AKUKATE, HOIDES
SELLE ÜLEMISEST ÄÄREST JA VAJUTA ALLA



EEMALDA TAKJAPAEEL



ÜHENDA LAHTI
TOITEPISTIK



AVA LUKUSTI



TEISE KÄEGA HAARA TAKJAPAELAST JA TÕMBA SEDA VÄLJA.



HOIA RIHMA RIHMAST



EEMALDA
AKU

4.2 Laadimisnõuded


Laadijat kasutatakse aku laadimiseks. Ärge kasutage ratastooli laadimise ajal.

Laadimise spetsifikatsioonid

Sisendpinge: AC100~240V Väljundpinge: 24V/DC Väljundvool: 8A

4.3 Laadija kasutamine

Saate oma ratastooli laadida juhtpaneeli kaudu. Laadimispesa asub juhtpaneeli allosas.

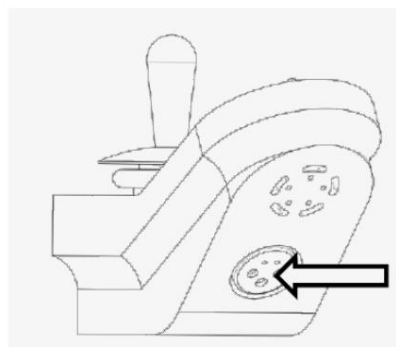

Aku laadimiseks ühendage laadija toiteallikaga ja akukarbi pistikuga. Laadimisprotsessi lõpuleviimiseks järgige alltoodud juhiseid.

1. samm: veenduge, et laadimisport poleks blokeeritud
2. samm: Veenduge, et elektriline ratastool on välja lülitatud
3. samm: Ühendage akukasti ja kontrolleri vahelised pistikud

4. samm: Ühendage laadija väljundpistik akukarbi toitepistikuga
5. samm: Ühendage laadija peapistik toiteallikaga ja punane tuli süttib. Täielik laadimine võtab aega 8–10 tundi. Ärge laadige kauem kui 24 tundi.
6. samm: Aku eluea pikendamiseks laadige akut vähemalt kord kuus, kui ratastooli ei kasutata.



Ärge lõpetage laadimist enne, kui protsess on lõppenud. Aku kasutamine ilma piisava laadimiseta lühendab selle kasutusiga. Kui aku on täielikult laetud, muutub indikaator rohelisteks. Pärast laadimise lõppu lülitage toide välja, vastasel juhul tühjeneb aku aeglaselt. Ärge laadige kauem kui 24 tundi. Ülelaadimine on ohtlik.



Laadimise ajal ohtude vältimiseks peavad kasutajad järgima järgmisi reegleid:

Kui ratastooliga ei ole laadijat kaasas, palun kasutage standardset laadijat väljundpingega 24V

8A. Ärge jätke ratastooli laadimise ajal päikesevalguse kätte ega niiskesse keskkonda.

Laadimise ümbritseva õhu temperatuurivahemik on 10–50 °C. Kui see on väljaspool ümbritseva õhu temperatuurivahemikku, ei saa aku korralikult töötada ja võib rikki minna.

Laadimise ajal on normaalne kuulda müra, kuna ventilaator töötab laadija ülekuumenemise vältimiseks.

Laadimise ajal vältige vedeliku sattumist laadijasse. Samuti ärge asetage laadijat tuleohtlikele esemetele, näiteks kütusele, jalatoele või istmepadjale.

5. Aku kasutamine ja hooldus

Vale aku vahetamine võib põhjustada plahvatusohtu. Vahetuseks sobib ainult sama või soovitatud tüüpi aku. Lisaks veenduge, et aku poolused on õigesti ühendatud. Aku eluea pikendamise võtmeteguriks on sagedane laadimine, et aku oleks täis laetud. Kui te ei kasuta ratastooli pikka aega, on soovitatav seda laadida kaks korda kuus.

Laadimiskeskonna temperatuur on 10 kraadi Fahrenheiti järgi, mistõttu aku ü kuni 50% Kui see on keskkonnast väljas ei tööta korralikult ja võib akut kergesti kahjustada.

Ventilaatori heli laadimise ajal on normaalne. See on mõeldud laadija jahutamiseks, palun ärge selle pärast muretsege.

Vältige laadimise ajal vedeliku sattumist laadijasse. Lisaks ärge asetage laadijat tuleohtlikele esemetele, näiteks kütusele, jalatoele või istmepadjale.

5 Aku kasutamine ja hooldus

Aku vale vahetamine võib põhjustada plahvatusohtu. Vahetamiseks sobib ainult sama või soovitatud tüüpi aku.

Lisaks veenduge, et aku poolused on õiged. Aku eluea pikendamise põhipunktid: laadige sageli, et aku oleks täis laetud. Kui ratastooli ei kasutata, on parem aku täielikult laadida. Kui te ei kasuta ratastooli pikka aega, on parem laadida kaks korda kuus.

6. Kontroller



7. Hooldus

Ratastooli hooldus hõlmab ratastooli puhastamist, ratta ja aku kontrollimist ning aku laadimist.

Edasiseks hoolduseks võtke ühendust edasimüüjaga. Soovitame ratastooli kontrollida iga kahe aasta tagant.

9. Kontaktandmed

Ettevõtte nimi MOBIAK SA	
Aadress	KATHIANA AKROTIRIOU
	Telefon: +30 28210 63222
	Meiliaadress: mobiakcarequality@mobiak.com
Veeb	www.mobiakcare.com

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

10. Garantii:

Tootele kehtib ostukuupäevast alates kahe* (2) aasta pikkune garantii nõuetekohaseks toimimiseks.

Garantii katab tehasedefektid ja EI kata kahjustusi, mis on tekkinud väärkasutusest, ebapiisavast hooldusest, modifitseerimisest, kuritarvitamisest või toote juhiste mittetäitmisest. Samuti EI kata see kuluvaid osi, nagu pidurid, rattad ja plastdetailid ning kõik, mis võib kasutamise või aja jooksul kuluda.

Garantii ei kata ka kahjustusi või defekte, mis on põhjustatud: loodusõnnetustest, volitamata hooldusest või remondist, elektrivarustusprobleemidest, transpordiettevõtetest

*Aku garantii kuus (6) kuud

Tööd ega osad ei ole kaetud, kui neid pole üle vaadanud volitatud teeninduskeskus või toote tootja. Ülevaatusel transpordikulud tasub kasutaja, klient või jaemüüja.

GARANTIIVORM

OSTJA ANDMED			
TÄISNIMI:			
OSTUKUUPÄEV:		TELEFON:	
SEERIANUMBER:			
PARTII:			
POE ANDMED			
KAUBAMÄRK:			
AADDRESS:			
TELEFON:			
POE TEMPEL JA ALLKIRI			

VAHEJUHTUMI ARUANNE:

Kõik seadme kasutamisega seotud tõsised intsidendid tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient elab.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kinnitame oma ainuisikulise vastutuse all, et käesolevas deklaratsioonis nimetatud meditsiiniseadmed kuuluvad madala riskikategooriasse (riskiklass I) ja vastavad Euroopa määruse 2017/745 nõuetele ning vajadusel ka nimetatud standarditele ja õigusaktidele.



MOBIAC S.A
KAOIANA AKPQTHPIOY, XANIA - KPHTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

