



# KING RAISED TOILET SEATS

WITH LATERAL LOCKING SYSTEM

EN USER MANUAL  
 DE BENUTZERHANDBUCH  
 FR MANUEL DE L'UTILISATEUR  
 ES MANUAL DE USUARIO  
 IT MANUALE D'USO  
 PT MANUAL DO USUÁRIO  
 SL NAVODILA ZA UPORABO  
 HR KORISNIČKI PRIRUČNIK  
 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
 RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА  
 SK POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA  
 CS UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL  
 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 LT VARTOTOJO VADOVAS  
 ET KASUTUSJUHEND  
 LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  
 FI OHJEKIRJA  
 SV ANVÄNDARMANUAL  
 NL HANDLEIDING



KING-5-KN  
 KING-10-KN  
 KING-15-KN



KING-5S02/04-KN  
 KING-10S02/04-KN  
 KING-15S02/04-KN



KING-5L-KN  
 KING-10L-KN  
 KING-15L-KN



KING-5LS02/04-KN  
 KING-10LS02/04-KN  
 KING-15LS02/04-KN



KING-L-KN  
 KING-LS-KN



KING-CRTS02-KN  
 KING-CRTS04-KN



KING-BDT-KN

# KING POTIKÖRGENDUSED

## KÜLGMISE LUKUSTUSSÜSTEEMIGA

### ETTENÄHTUD KASUTUSVIIS:

*KING sarja külgmise lukustussüsteemiga potikörgendused* on mõeldud tualetipoti kõrguse suurendamiseks, et hõlbustada istumise ja püsti tõusmise protseduure ning edendada iseisvust ja mugavust. Pehmendusega varustatud mudelid pakuvad paremat istmemugavust, muutes need pehmeks ja mõnusamaks. Lisaks sellele tagab padja kortsuline pind suurema hõõrdumise ja stabiilsuse. Toode on saadaval erinevates konfiguratsioonides, pehmendusega või ilma ning kaanega või ilma. Pehmendused on saadaval erinevates värvitoonides. Kaaned, bideed ja pehmendused on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.

### NÄIDUSTUSED JA VASTUNÄIDUSTUSED:

KING tootesarja külgmise lukustussüsteemiga potikörgendused on suunatud eakatele inimestele, ratastooli kasutajatele, inimestele, kellel on piiratud liikumisvõime nimmel, põlvedel või puusadel, ja kõigile neile, kellel võib olla raskusi tualetipotile istumise ja üles tõusmisega. Istumise ajal pehmendusega varustatud mudelid deformeeruvad, suurendades seeläbi kasutaja toetuspinda ja võimaldades paremat kehakaalu jaotumist. See muudab need mudelid eriti sobivaks kasutajatele, kes kannatavad haavandite või neid põhjustada võivate haiguste, näiteks diabeedi all. Toote kasutamiseks on vaja iseseisvat istumisvõimet. Toodet ei soovitata kasutada istumise ajal esinevate tajuhäirete või tasakaaluprobleemide korral.

### OHUTUSHOIATUS JA MÄRKUSED:

- Paigaldusjuhendis märgitud maksimaalset kehamassi ei tohi ületada.
- Enne iga kasutamist veenduge, et toode on tualetipotile paigutatud stabiilselt ja kaasasoleva lukustussüsteemiga õigesti kinnitatud.
- Veenduge, et pehendus asetseb istme õigesti.
- Enne pehmenduse paigaldamist veenduge, et iste on puhas ja kuiv.
- Kokkupanekul järgige rangelt kasutusjuhendis näidatut.
- Ärge muutke toodet ja selle komponente mitte mingil viisil.
- Ärge kasutage toodet, kui see on mingil viisil kahjustatud või muudetud.
- Veenduge, et toote kõrgus on selline, mis teeb selle kasutajale lihtsaks ja ohutuks.
- Kasutamise ajal vältige asendeid, mis hoiavad keharaskust liiga palju ette- või tahapoole kallutatuna. Vale asend võib põhjustada toote ebastabiilsust ja ümberminekut.
- Toodet ja tarvikuid ei tohi hoida välitingimustes.

### HOOLDUSINFO:

Toote hooldus koosneb puhastus- ja sanitaarprotseduuridest. Ohutu kasutamise ja piisava hügieenistandardi tagamiseks peaks kasutaja neid protseduure läbi viima enne iga kasutuskorda. Kasutaja peab veenduma seadme ja selle komponentide konstruktsiooni terviklikuses ning kontrollima, et kruvid oleks tihedasti kinni. Puhastus- ja sanitaarprotseduuride puhul järgige alljärgnevat samme:

1. Kandke kindaid.
  2. Enne desinfitseerimise jätkamist eemaldage kõigepealt ilmne mustus.
  3. Kasutage puhastamiseks vett või mitteagressiivset puhastusvahendit.
  4. Pühkige kuiva ja puhta lapiga.
- Alternatiivina võib toodet puhastada kodumajapidamises kasutatavas nõudepesumasinas maksimaalsel temperatuuril. Pehmendust tuleb rangelt puhastada käsitsi.

### KORDUVKASUTUSE NÕUDED:

Toode sobib korduvkasutamiseks teistele kasutajatele. Enne taaskasutamist tuleb toode nõuetekohaselt puhastada ja desinfitseerida. Enne toote üleandmist teistele peab toode olema kontrollitud kvalifitseeritud edasimüüjate poolt.

### ÕIGE JÄÄTMEKÄITLUS:

Ärge visake toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Küsige oma kohalikult omavalitsuselt, kuidas see õigesti ja keskkonnasõbralikult kõrvaldada.

### VAHEJUHTUMITEST TEATAMINE:

Kui selle seadmega on toimunud tõsine vahejuhtum, võtke ühendust toote tootjaga aadressil [info@kingbathrooms.com](mailto:info@kingbathrooms.com) ja oma riigi vastutava asutusega.

ESEME KOOD	KIRJELDUS	LEHT
<b>KING-5-KN</b>	Potikörgendus 5 cm/2in King	<b>44</b>
<b>KING-5L-KN</b>	Potikörgendus 5 cm/2in koos kaanega King	<b>44</b>
<b>KING-10-KN</b>	Potikörgendus 10 cm/4in King	<b>44</b>
<b>KING-10L-KN</b>	Potikörgendus 10 cm/4in koos kaanega King	<b>44</b>
<b>KING-15-KN</b>	Potikörgendus 15 cm/6in King	<b>44</b>
<b>KING-15L-KN</b>	Potikörgendus 15 cm/6in koos kaanega King	<b>44</b>
<b>KING-5S02/04-KN</b>	Pehme potikörgendus 5 cm/2in helesinine/hall King	<b>45</b>
<b>KING-5LS02/04-KN</b>	Pehme potikörgendus 5 cm/2in kaanega helesinine/hall King	<b>45</b>
<b>KING-10S02/04-KN</b>	Pehme potikörgendus 10 cm/4in helesinine/hall King	<b>45</b>
<b>KING-10LS02/04-KN</b>	Pehme potikörgendus 10 cm/4in kaanega helesinine/hall King	<b>45</b>
<b>KING-15S02/04-KN</b>	Pehme potikörgendus 15 cm/6in helesinine/hall King	<b>45</b>
<b>KING-15LS02/04-KN</b>	Pehme potikörgendus 15 cm/6in koos kaanega helesinine/hall King	<b>45</b>
<b>KING-L-KN</b>	Potikaan potikörgendusele 5/10/15 cm King	<b>46</b>
<b>KING-LS-KN</b>	Potikaan pehmele potikörgendusele 5/10/15 cm King	<b>46</b>
<b>KING-BDT-KN</b>	Bidee potikörgendusele 5/5L/10/10L/15/15L King	<b>47</b>
<b>KING-CRTS2/4-KN</b>	Pehmendus potikörgendusele helesinine/hall King	<b>47</b>

IKON

KIRJELDUS



Tehtud Itaalias



Tööriistad Tasuta kokkupanek



Nõudepesumasinasõbralik



Maksimaalne kasutaja kaal




Garantii 2 aastat



Skannige kokkupanekuvideo jaoks QR-KOOD


KING-5-KN  
KING-10-KN  
KING-15-KN

H = 5/10/15 CM

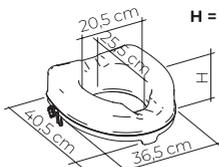

KING-5L-KN  
KING-10L-KN  
KING-15L-KN


H = 5/10/15 CM

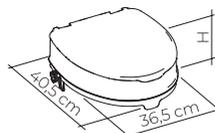

1



2

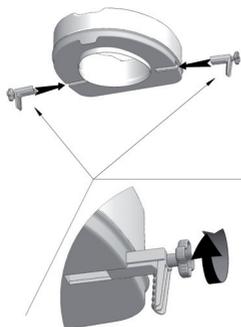

3



4



5




250 kg  
550 lg




CE MD



KING-5S02/04-KN  
 KING-10S02/04-KN  
 KING-S02/04-KN

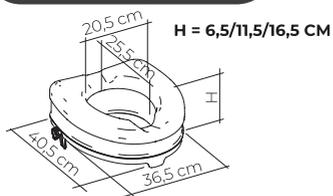


KING-5S02/04-KN  
 KING-10S02/04-KN  
 KING-S02/04-KN

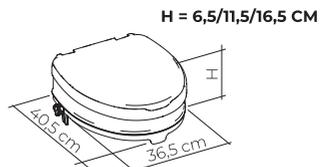

1

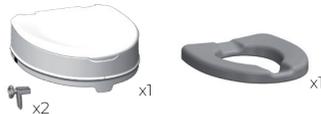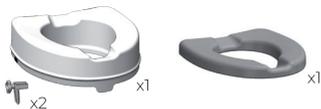

2

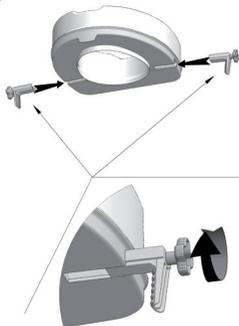

3



4



5



6



7




250 kg  
 550 lg




CE MD

KING-L-KN  
KING-LS-KN

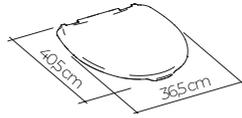

1

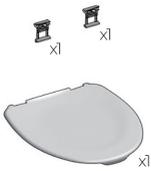


KING-L-KN




KING-LS-KN

2

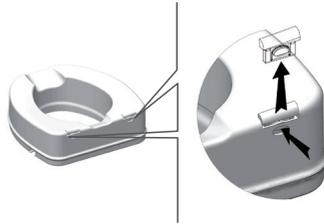


3

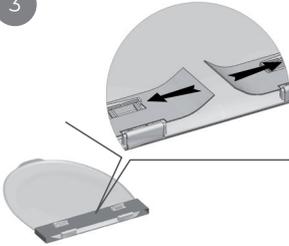


KING-L-KN

4

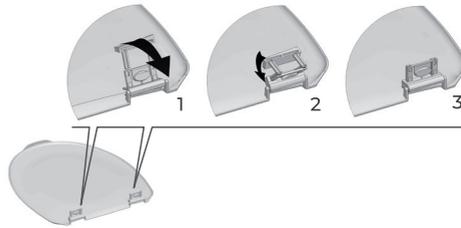


KING-LS-KN

5

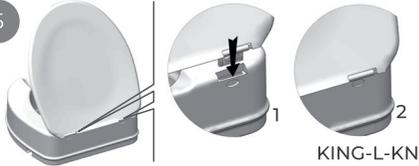

KING-L-KN

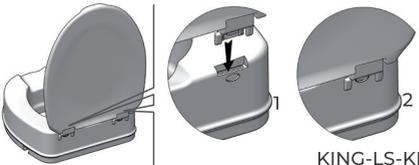

KING-LS-KN

6



KING-L-KN




KING-LS-KN



CE MD

KING-BDT-KN

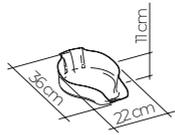

1



2




3



CE MD

KING-CRTS02-KN  
KING-CRTS04-KN

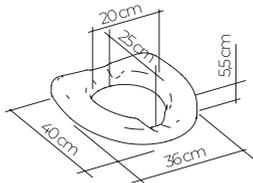

1



2



3



CE MD  
MADE IN P.R.C.



Manufactured by



LM Global Design Ltd.  
Suite 123, The Capel Building  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 VY68, Ireland



Distributed by:



[www.kingbathrooms.com](http://www.kingbathrooms.com)  
[info@kingbathrooms.com](mailto:info@kingbathrooms.com)