

KASUTUSJUHEND

Alumiiniumist siseruumides 4-rattaline rulaator


Tootekood: PEDRO



1. Omadused

Siseruumides olev 4-rattaline rulaator on valmistatud anodeeritud alumiiniumraamist. Rulaator on varustatud parkimisfunktsiooniga pidurid ja salv kotiga. Tootel on tugevad 8-tollised piduritega tagarattad, tugevad pöörlevad 8-tollised esirattad ja reguleeritava kõrgusega pehme käepidemega käepide.

Komplekti kuulub: raam kotiga, esi- ja tagajalad ratastega, kandik, lukustusnupud (4 tk).

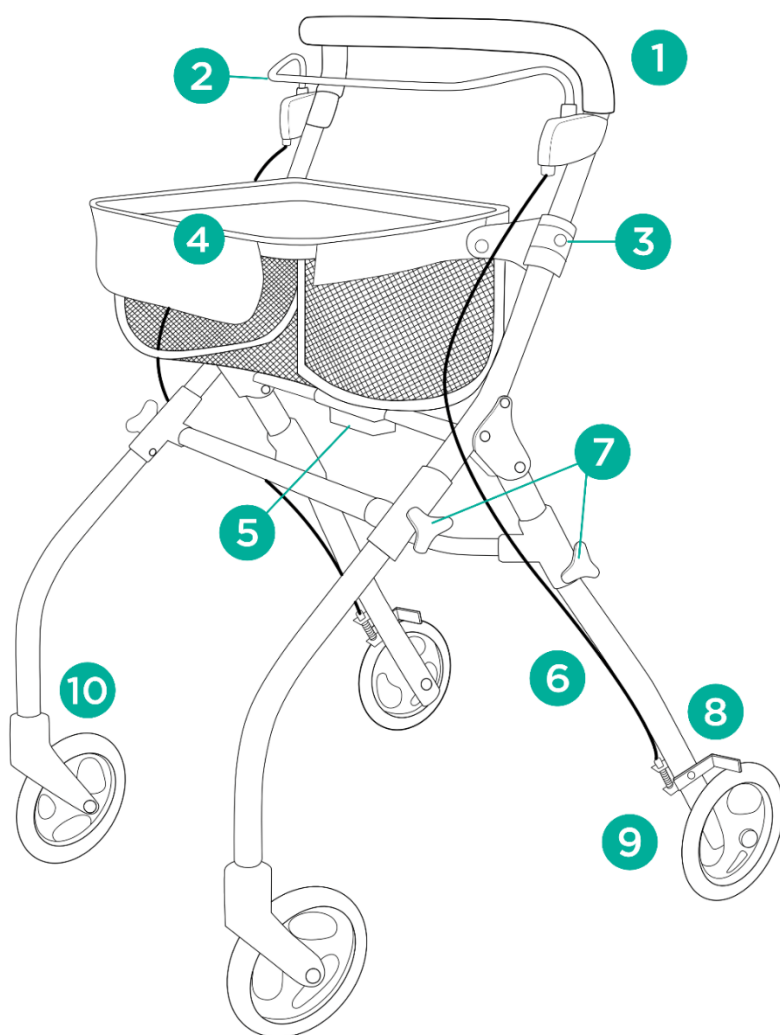

Rollaatori elemendid:

1. Käepide
2. Parkimisfunktsiooniga pidurikäepide
3. Reguleerimisklamber
4. Kott kandikuga
5. Kokkupandav mehhanism
6. Piduri tross
7. Lukustusnupud
8. Pidur
9. Tagumine 5" ratas
10. Eesmine 5" pöörlev ratas

2. Rakendus

Rulaator on mõeldud liikumispuudega patsientidele, kes vajavad kõndimisel stabiilset tuge ja abi. Soovitatakse ka eakatele abivahendina tasakaalu hoidmisel, kõndimismugavuse parandamisel ja kukumisohutuse tagamisel. Rulaatori kasutamine mõjutab positiivselt liikumis- ja püstiasendiprobleemidega inimeste

aktiivsuse taastumist. See tagab parema stabiliseerimise, toe ja turvalisuse kõndimisel. Rulaator on mõeldud kasutamiseks siseruumides.

3. Kokkupanek

Rulaatori lahti voltimine

- Asetage esi ja tagajalad raami avadesse, kuni kuulete klõpsatust, ja kinnitage need külgedel olevate lukustusnuppudega.
- Voldi raam ja kott lahti. Asetage kandik kotti peale.

Rulaatori voltimine

- Eemaldage kandik, kott veidi tahapoole ja keerake seejärel alla.
- Rulaatori voltimiseks vajutage kotti all olevat voltismehhanismi.

Pidurite funktsioon

- Rulaatori peatamiseks tõmmake piduri käepidet ülespoole ja hoidke seda.
- Lukustage pidur, vajutades piduri käepidet alla. Piduri vabastamiseks tõmmake piduri käepidet ülespoole.

Kõrguse reguleerimine

- Käepideme kõrguse reguleerimiseks avage reguleerimisklamber ja valige sobiv kõrgus. Kõrguse kinnitamiseks lukustage hiljem klamber.

Märkus! Käepide peab olema raami mõlemal küljel samal tasemel.

4. Tehnilised andmed

Üldlaidus	60 cm
Üldine sügavus	66 cm
Salve mõõtmed	38x29 cm
Käepideme kõrguse reguleerimine	89-94 cm
Kaal	5,6 kg
Max kasutaja kaal	115 kg
Max kotti ja kandiku koormus	5 kg
Raami värv	roheline

5. Märkmed

Timago International Group ei vastuta rulaatori ebaõige kasutamise, ohutuseeskirjade eiramise ja väärkasutuse eest.

6. Hooldus

Puhastamine

- Puhastage raam niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt.
- Ärge kasutage tugevaid poleerimisvahendeid, kuna on oht kaitsekatete kahjustamiseks.
- Puhastage regulaarselt mustust rulaatori liikuvatest osadest (hinged, kinnituskruvid, lukud).

8. Ladustamis ja transporditingimused

Seadet ei tohi jätta otsese päikesevalguse, vee ega niiskuse kätte.

9. Garantii teave

Kõikidel meie ettevõtte poolt levitatavatel toodetel kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie kodulehel oleval garantiikaardil. Võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Pidage meeles, et garantii tagamiseks tuleb säilitada ostutšekk (tšekk või arve).

10. Sildid

	Viitenumber		Tootja
	LOT number		Tootmine kuupäev
	Seerianumber		Meditseeniseade
	Märkus		Palun lugege juhendit
	Tootja kontrollis vastavust olulistele meditsiiniseadmete nõuetele.		

Meie täielik tootesari on saadaval meie edasimüüjatelt.

Lisateavet leiate aadressilt **www.timago.com**.

Täname, et valisite Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



02/2025 (II)