

KASUTUSJUHEND

WC-dušitool

Tootekood: **Movano**



1. Täitmine

Tualett- ja dušitool on valmistatud vastupidavast PP (polüpropüleen) materjalist. Sellel on kõrgusega reguleeritavad alumiiniumjalad libisemisvastaste kummikatetega. Reguleerimine võimaldab kohandada seda vastavalt patsiendi individuaalsetele vajadustele. Seljatugi ja iste on varustatud pehme, eemaldatava padjaga. Külgmised käetoed suurendavad mugavust. Stabiilsus ja kasutusohutus. Tool on varustatud kergesti eemaldatava kaanega plastmassist siibriga.

Komplekti kuulub: istmeraam, seljatugi, käetoed (2 tk), jalad kinnitustega (4 tk), istmepadi, seljatoepadi, siiber kaanega.

Komponendid:

- A. seljatugi
- B. seljatoepadi
- C. käetugi
- D. istmepadi
- E. istmeraam
- F. jalg
- G. libisemisvastane kork
- H. siiber



2. Taotlus

Tualett-/dušitool on abivahend, mis aitab kasutajal hügieenitoiminguid teha. Seda soovitatakse inimestele, kellel on raskusi iseseisva liikumisega, puuetega ja

liikumispiirangud, mis takistavad või raskendavad igapäevaste toimingute iseseisvat sooritamist. Tool toimib tänu istme all olevale siibrile tualetina. See hõlbustab kasutaja igapäevaseid füsioloogilisi ja isikliku hügieeni tegevusi. Tooli soovitatakse kasutada ka duši all ja vannis nii kodus kui ka haiglas.

3. Paigaldamine, seadistamine ja kasutamine

TOOLIPAIGALDAMINE

1. samm. Pöörake tool ümber ja sisestage jalad kinnitusavadesse. Jalgadel on lukustustihvtid – enne jala sisestamist vajutage tihvti ja seejärel lukustage jalg.

2. samm. Reguleerige jalgade kõrgust reguleerimistihvtide abil.

3. samm. Pöörake tool ümber ja asetage see maapinnale.

Märkus: Kõik jalad peaksid olema samal tasapinnal ja toetuma kindlalt maapinnale.

4. samm. Sisestage seljatugi istmeraami kinnitusavadesse

5. samm. Sisestage mõlemad käetoed istmeraami kinnitusavadesse.

6. samm. Sisestage kaanega siiber istmeraami auku.

7. samm. Sisestage seljatoepadi seljatoe kinnitusavadesse (3 kinnitusklambrit).

8. samm. Asetage istmepadi tooli istmele – padjal olevad 4 sakki muudavad selle õige paigutamise lihtsaks.

KÕRGUSE REGULEERIMINE

Tooli kõrguse reguleerimiseks vajutage jala reguleerimistihvti, valige soovitud kõrgus ja seejärel lukustage tihvt. Jalgu saab reguleerida 2,5 cm kaupa.

Märkus: kõik jalad peavad olema samal tasapinnal ja toetuma kindlalt maapinnale.

KASUTAMINE

Tõstke istmepadi üles ja seejärel eemaldage siibri kate.

Pärast kasutamist katke siiber kaanega ja asetage istmele padi.

Märkus: Ärge unustage siibrit pärast iga kasutuskorda tühjendada.

4. Tehnilised kirjeldused

Kogulaius	56 cm
Kogusügavus	48 cm
Seljatoe kõrgus	35 cm
Istme kõrgus maapinnast	41–53 cm
Kogukõrgus maapinnast	76–88 cm
Istme mõõtmed	46 cm x 43 cm
Kaal	5,1 kg
Maksimaalne koormus	150 kg
Värv	hall

5. Kommentaarid ja soovitused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise või ettenähtud otstarbest erineva kasutamise eest.

6. Hooldus Tooli

tehnilist seisukorda peaksite regulaarselt ise kontrollima:

- Tooli tuleks regulaarselt puhastada, kasutades ainult vett ja õrnu pesuvahendeid või sertifitseeritud pesuvahendeid. Kuivatage hoolikalt.
- **Ärge kasutage** puhastamiseks: tugevaid poleerimisvahendeid, tugevaid pesuvahendeid, abrasiive, valgendit, bensiini, lahusteid.
- Pärast iga kasutuskorda tuleks anum tühjendada ja desinfitseerida.

7. Säilitamis- ja transporditingimused

Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse, vee ega niiskuse kätte.

8. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie veebisaidil oleval garantiikaardil. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Pange tähele, et ostutõend (kviitung või arve) tuleb garantii eesmärgil alles hoida.

9. Märgistused

	Viitenumber		Produtsent
	Seerianumber		UDI-s
	Seerianumber		Meditseeniseade
	Tähelepanu		Jälgige juhiseid
	Toode vastab meditsiiniseadmete esitatavatele kehtivatele juriidilistele nõuetele (MDR 2017/745)		



Timago rahvusvaheline kontsern

Ossowski Sp. k.

Karpacka tänav 24/12

43-316 Bielsko-Biały, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com



08/2025 (I)